



Varenr. 1572  
HMS-nr.: 233408

# Armbåndssender (HMS-nr. 236497) med mottaker ARM



## Brukerhåndbok

---

Dok. nr.: 2447B  
Dato: 2017.10.04



# Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
Varslingsmåter	4
Rekkevidde	4
Batteri	4
<b>2. Oversikt</b>	<b>4</b>
I pakken	4
<b>3. Komme i gang</b>	<b>5</b>
Armbåndsmottaker	5
Armbåndssender	6
<b>4. Viktig informasjon</b>	<b>7</b>
<b>5. Resirkulering</b>	<b>7</b>
<b>6. Tekniske data</b>	<b>7</b>
Armbåndsmottaker	7
Armbåndssender	7

## 1. Innledning

---

ARMBÅNDSSENDER er en sender som vi har designet for å bæres på håndleddet. Ved et enkelt trykk på armbåndssender kan man aktivisere en varsling som vises på varslingssystemet FlexiBlink.

ARMBÅNDSSENDER kan f.eks. brukes som sykesignal eller assistansealarm. Man kan selv bestemme hvilken type varsling som skal vises på FlexiBlink ved konfigurasjon på ID-velgeren.

Funksjoner:

- Enkel å betjene.
- Sprutsikker.
- Signalrekkevidde innen normal husstand.
- Lavt strømforbruk
- Enkelt å tilpasse lengde på armbåndet.
- Enkel installasjon og bruk.
- Mulighet for opptil 48 armbåndssender til en armbåndsmottaker.

Produktet er sprutsikkert, og det kan derfor bæres mens man dusjer. Det kan derimot ikke senkes ned under vann som f.eks. i et badekar.

Armbåndssender



Armbåndsmottaker



## Varslingsmåter

ARMBÅNDSSENDER aktiverer varsling ved å trykke på trykknappen på senderen. Signalet blir sendt til armbåndsmottakeren som videresender signal til Flexiblink systemet.



## Rekkevidde

Armbåndssenderen og Armbåndsmottakeren dekker en vanlig enebolig eller leilighet.

## Batteri

ARMBÅNDSSENDER har innebygd oppladbart batteri som lades ved hjelp en ladekontakt som følger med produktet.



Laderkontakt kobles til en standard USB lader(medfølger). Produktet bør lades minimum hver 14. dag.

Dok. nr.: 2447 A2  
Dato: 2017.09.26

## 2. Oversikt

### I pakken



Armbåndssender  
HMS art.nr.: 233401




Armbåndsmottaker



Ladekontakt



USB-lader

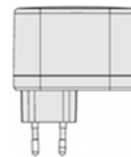

Strømadapter

### Armbåndsmottaker



Forside



Bakside

### 3. Komme i gang

#### Armbåndsmottaker

##### Strømtilkobling

Koble strømadapter til enheten og til strømuttak i veggen

##### Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter du har i boligen, må stilles inn med lik huskode. Skyv knappene i huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger  
(fabrikkinnstilling)

##### Velg funksjon (ID-velger)

Armbåndsmottaker kan varsle mange forskjellige typer hendelser. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger  
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsling type	Signal-type
0	Sykesignal	Alarm
1	Sykesignal Nr.2	Alarm
2	Sykesignal Nr.3	Alarm
3	Sykesignal Nr.4	Alarm
4	Kom nå!	Alarm
5	Kom snart!	Daglig
6	Hjelp meg nå	Alarm
7	Assistanse ønskes	Daglig
8	Sykesignal 1 til 9 (sone 1)	Alarm
9	Sykesignal 1 til 9 (sone 2)	Alarm
A	Sykesignal 1 til 9 (sone 3)	Alarm
B	Sykesignal 1 til 9 (sone 4)	Alarm
C		
D		
E	Klokke Tale Iris	
F	Hjelp meg nå (nabo)	Alarm

##### Større bygg /institusjoner

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov for å kombinere en eller flere armbåndsendere mot flere armbåndsmottakere, så anbefaler vi å benytte Funksjonsvelgeren i posisjon 8 til B. Det er også mulig å skille på de enkelte armbåndene. Ved behov som vedrører disse tingene så anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

## Montering


Armbåndsmottaker monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelåstapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til vegg gjennom festehullet under batteriet.

## Armbåndssender

Før du begynner å bruke armbåndet, bør du lade armbåndssender.

Du kan sjekke om det er strøm på enheten ved å trykke på knappen. Armbåndssender skal da gi et lysblink på lysdiode på armbåndet.

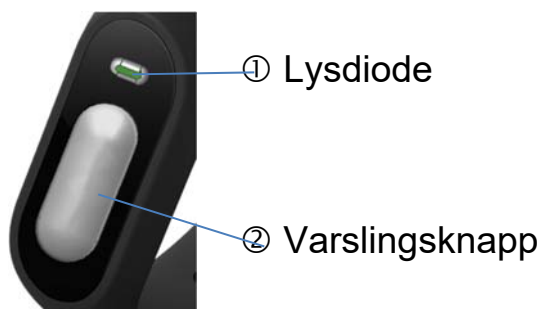

## Sammenkobling

Sammenkobling mellom armbåndssender og armbåndsmottaker er som regel allerede utført på nye produkter. Dersom produktene ikke virker sammen så utfører man sammenkoblingen på følgende måte:


1. Hold Testknapp② på armbåndsmottakeren inne i 6

sekunder, til lysdiode① begynner å blinke.

2. Trykk deretter på varslingsknapp② på armbåndssenderen.

Når sammenkoblingsprosessen er ferdig, vil armbåndsmottaker indikere at sammenkobling er suksessfull ved å tenne lysdioden i 2 sekunder.

Du kan nå sjekk sammenkoblingen ved å aktivisere en varslings fra armbåndssenderen.

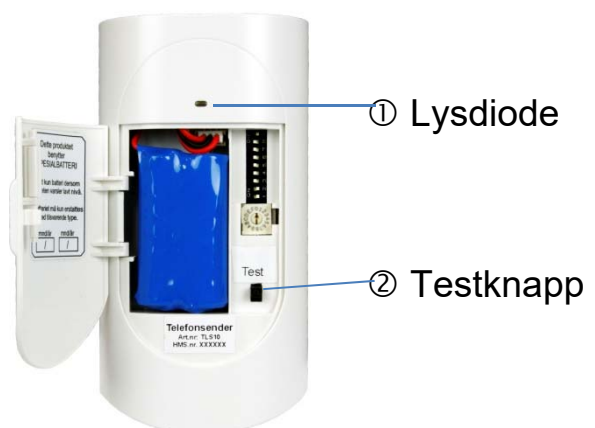

## Fjerne sammenkobling

Dersom man ønsker å fjerne sammenkobling mellom armbåndssender(e) og armbåndsmottaker så gjøres dette ved å trykke og holde testknappen på armbåndsmottakeren inne i ca 12 sekunder. Etter 6s begynner lysdioden å blinke(ref sammenkobling) og etter 12s begynner den å blinke hurtigere. Når den gjør det så slipper du testknappen.

## 4. Viktig informasjon

---

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Armbåndsmottakeren er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Armbåndsmottakeren vil varsle til FlexiBlink mottakere om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

## 5. Resirkulering

---

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 6. Tekniske data

---

### Armbåndsmottaker

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	142,475 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

### Armbåndssender

Dim. (lxb):	235x10mm
Håndleddets omkrets:	10,5-21 cm
Vekt m/ batteri:	40 g
Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

