

AudioLink 

Varenr. 1532
Artikkelnr. DUO
HMS-nr.: 233383

DUO

Aktiv høyttaler

oppladbar m/ 2 mikrofonmottaker



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2420A1
Dato: 2017.04.20

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
DUO	3
Komme i gang	4
Koble til strømforsyningen	4
Stille inn mikrofonkanal	4
3. Daglig bruk	4
Ta DUO i Bruk	4
Lading	4
4. Avansert bruk	5
Lydingang	5
Lydutgang	5
Innstille mikrofonkanal	5
5. Viktig informasjon	5
6. Resirkulering	6
7. Tekniske data	6
Kanaloversikt	6
8. Tilbehør	7
9. Feilsøking	8

1. Innledning

DUO er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av stemme.

Med DUO kan du prate til forsamlinger i store rom/klasserom, du kan bruke den i mindre møter og der du ellers sliter med å bli hørt.


DUO har to mottakere, slik at 2 mikrofoner kan brukes samtidig. DUO kan brukes sammen med mikrofoner i AudioLink systemet.

2. Oversikt

DUO



Figur 1 Bakside med kontrollere og tilkoblinger

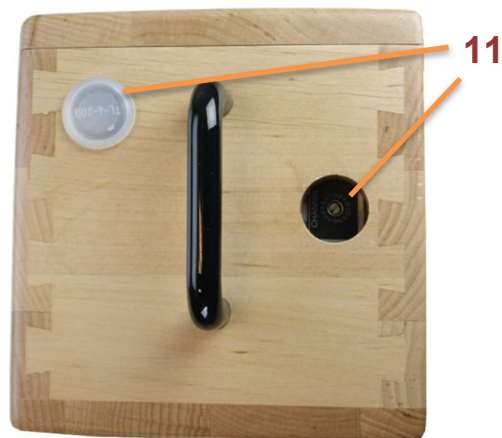

Figur 2 Topp

1. Av/på bryter m/integrert indikatorlampe.
2. Strømforsynings-kontakt 13,2V DC / 5A.
3. Volumkontroll.
4. Line in 1 (Stereo).
5. Line in 2 (Stereo).
6. Line out (Mono) 1 og 2.
7. Line out (Stereo).
8. Grønt lys: Lading ferdig.
9. Rødt lys: Lading pågår.
10. Gult lys: Mikrofon påslått (på riktig kanal).
11. Kanalvelgere finnes under plastpropper på toppen av kassen
12. Nivåjustering Line out 1. Bruk en liten skrutrekker.

Komme i gang

Koble til strømforsyningen

DUO må lades før første gangs bruk. Benytt den medfølgende strømforsyningen og koble den til i kontakten (2).

Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampen (9) lyse mens DUO lades.

DUO er fullt oppladet når lampen (8) lyser.

Du kan bruke DUO normalt også når den er tilkoblet lading.

Stille inn mikrofonkanal

DUO må stilles inn til samme kanalene som på mikrofonene du skal benytte.

Du kan enten endre kanal på DUO eller stille inn kanal på mikrofonen.

Se avsnitt 5. under



Tips

Hvis du ikke vet mikrofonens innstilte kanal, kan du vri kanalvelgeren på DUO sakte fra 0 til F. Når man kommer til riktig kanal vil lampen (10) lyse.

3. Daglig bruk

Ta DUO i Bruk

1. Slå på DUO (1).
Lampen lyser grønt.
2. Behold lydvolument på minimum.
3. Slå på mikrofonen(e) du skal benytte.
4. Lampen (10) lyser når en mikrofon er koblet til.
5. Pass på at du har mikrofonen i riktig avstand til munnen.
Se bruksanvisningen for mikrofonen.
6. Juster lydstyrken (3) til et behagelig lydnivå oppnås for tilhørerne.



Viktig

Hvis du opplever piping (feedback) er lydnivået stilt inn for høyt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til DUO. Forsøk å skru ned lydstyrken, flytte deg utenfor DUOs "lydfelt" og bruk mikrofonen nærmere munnen.

Lading

DUO er beregnet for kontinuerlig lading, og den kan stå tilkoblet strømforsyningen når den ikke er i bruk. Da er du sikker på å alltid ha en fulladet DUO klar til bruk.

4. Avansert bruk

På baksiden av DUO er det indikatorer, kontakter og justeringsmuligheter. Til daglig er det bare tilkobling til ladekontakten (2) som man trenger å kjenne til,

Lydingang

DUO har 2 kontakter (4) og (5) for tilkobling av eksterne lydkilder, som f.eks. en MP3-spiller.

Du kan benytte 3-polet minijack-plugg og phono-kontakter. Lydkildene mikses automatisk.


Lydutgang

DUO har 2 kontakter (6) og (7) for tilkobling til andre lydsystemer.

Lydutgangen (6) er justert til standard linjenivå fra fabrikken. Hvis linjenivået er for kraftig for den enheten du kobler til, kan nivået justeres ved å vri på kontrollen (12). Bruk en liten skrutrekker.

Innstille mikrofonkanal

a) På oversiden av DUO
Vipp opp proppene som sitter over kanal-velgerne.
Bruk en liten flat skrutrekker og skru til riktig kanal: 0 – F

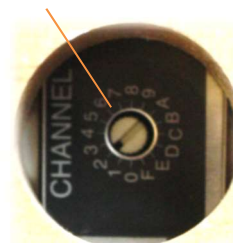

b) På mikrofonen
Se bruksanvisningen for mikrofonen.

5. Viktig informasjon

- DUO kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- DUO skal ikke utsettes for regn / vannsøl.
- Temperatur: -10°C-+40°C
- DUO skal ikke benyttes eller lagres der det er kondenserende luft.

6. Resirkulering

DUO skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Tekniske data

Frekvensområde:	100 – 12000 Hz
Radio båndbredde:	783 – 832 MHz
Bruksområde:	Innendørs.
Nominell driftsspennning:	11,1V DC
Strømforsyning/Lader:	13,2V DC / 5A
Normal ladetid:	6 timer
Normal brukstid:	11 timer
Vekt:	2800g
Dim (HxBxD):	305x130x150mm

Kanaloversikt

DUO leveres som standard med mottaker for AudioLink Kanalbank11, som har dette frekvensoppsettet:

Bank 11

Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens	
0	823,000		8	830,750	
1	829,750		9	823,500	
2	825,000		A	825,750	
3	826,750		B	831,250	
4	829,000		C	824,000	
5	832,000		D	828,250	
6	827,750		E	826,250	
7	824,500		F	830,250	

8. Tilbehør

Anbefalte hodebøylemikrofoner



HODEB1-S2
Varenr. 1172



HODEB3-S2
Varenr. 1174

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i (1).	Batteriet er tomt.	Koble til strømforsyningen og se at ladelyset (9) tennes,
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys i (1).	Lydnivået står for lavt	Skru opp lyden (3).
Ikke gult lys i (10)	Mikrofonen er ikke påslått.	Skru på mikrofonen
Ikke gult lys i (10)	Mikrofonen er på feil kanal.	Still inn riktig mikrofonkanal. Se kap. 4.
Det lyser ikke rødt i (9) når strømforsyningen er tilkoblet.	Lading er ferdig hvis lampen (8) lyser grønt.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen er ikke tilkoblet strøm (230VAC)	Koble strømforsyningen i kontakten på veggen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt assistanse/service.
Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet LINE OUT (6) og (7).	Eksternt utstyr er ikke påslått eller tilkoblet feil.	Sjekk eksternt utstyr.
	Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med potentiometer (5).

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

