

Bruksanvisning

ASSISTANSEALARM FL-ASSIST



2017-10-04
Dok.nr.: 0671C

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Innledning

Assistansealarmen FL-ASSIST er en del av FlexiBlink-systemet som benyttes for trygghets- og sikkerhetsløsninger for brukere med spesielle behov. FL-ASSIST har en alarmknapp og en alarmsnor for å påkalle assistanse. Produktet inneholder en radiosender som sender varslingsmeldinger til mottakere som står på samme huskode (kanal).

Varslingsmottakere i FlexiBlink serien vil varsle lys, lyd, tale, symboler og/eller tekst, avhengig av deres innebygde funksjoner. FlexiBlink mottakere er ferdig programmert med talemeldinger og symboler som passer til alarmene.

Hvis det er installert en FlexiBlink AppSender i boligen (institusjonen) vil denne kunne evaluere alarmene i henhold til gitte regler og iverksette ytterligere ekstern varsling.

Systemet tillater også enkelt oppsett av varsling til nabo, som ofte er den nærmeste assistenten utenfor boligen.

FL-ASSIST er tiltenkt brukt i boliger der personer kan tenkes å få behov for assistanse. Den er sprutsikker og kan dermed også installeres i badetrom.

Alarmsnoren kan dessuten gjøre det enkelt å påkalle hjelp når man ligger i sengen eller sitter på toalettet.

Klargjøring og montering

Assistansealarmen må stilles inn med informasjon om hvilket rom den installeres i og gis samme huskode (kanal) som varslingsmottakere opererer på.

1. Åpne FL-ASSIST ved å skru ut de fire skruene på baksiden av enheten.

2. Lokaliser huskodebryteren med 9 skyvebrytere. Still huskoden tilsvarende mønsteret på de andre enhetene i varslingsystemet.

3. Still ID-venderen til den posisjonen som best passer til installasjonsstedet og varslingsbehovet. Benytt en liten flat skrutrekker.

Se tabellen under for ID innstillingsvalg.



ID-velger



Huskodebryter

4. Et litium 9V batteri følger med og er koblet til inne i enheten. Det byttes ut når enheten markerer at batteriet begynner å bli dårlig med rød/grønn blink.

5. Skru enheten sammen igjen

6. Nå er Assistansealarmen klar til bruk.

7. Sett den fast på veggen med den medfølgende borrelås-tapen eller skru den fast med passende skruer gjennom festeørene.

Pass på at den sette opp slik at det er lett å komme til alarmknappen og/eller alarmsnoren.

Bytte batteri

FL-ASSIST drives av et 9 volt batteri. Batteriet kan vare i flere år. Ved batteribytte kan man bruke alle typer 9 volt batterier, men det anbefales å benytte høykapasitets litium batteri.

1. Åpne FL-ASSIST ved å skru ut de fire skruene på baksiden av enheten.

2. Koble fra batteriet og sett inn ett nytt batteri.

3. Skru enheten sammen igjen.

ID Innstillingsvalg

FL-ASSIST kan varsle på ulike måter alt etter behov og plassering:

ID	Varsel	ID	Varsel
0	"Assistanse ønsket", generell varsel ikke stedsspesifikk. Ikke nabovarsling.	8	Epilepsi alarm. Ikke nabovarsling.
1	"Assistanse ønsket, soverom" Ikke nabovarsling.	9	Sykesignal 2 – "Kom Nå! ". Ikke nabovarsling.
2	"Assistanse ønsket, badet" Ikke nabovarsling.	A	Sykesignal 1 - "Kom Snart". Ikke nabovarsling.
3	"Assistanse ønsket, stuen" Ikke nabovarsling.	B	
4	"Hjelp meg nå!", alarm ikke stedsspesifikt. Ikke Nabovarsling.	C	
5	"Hjelp meg nå!, soverom" Ikke Nabovarsling.	D	
6	"Hjelp meg nå!, badet" Ikke Nabovarsling.	E	"Hjelp meg nå!" Varsler i mottakere med aktivert nabovarslings-funksjon
7	"Hjelp meg nå!, stuen" Ikke Nabovarsling.	F	"Assistanse ønsket." Varsler i mottakere med aktivert nabovarslings-funksjon

Vi skiller mellom assistanse ønskes og påkalling av umiddelbar hjelp i nødssituasjoner. Hvilken innstilling som egner seg avhenger av brukeren. Det er selvsagt mulig å installere flere FL-ASSIST i boligen med ulike varslingsklasser.

Rekkevidde

FL-ASSIST dekker en normal leilighet eller enebolig. Rekkevidden kan utvides med FlexiBlink Repeater FBR10, hvilket kan være nødvendig hvis man ønsker å varsle hos nabo.

Funksjonskontroll

På FL-ASSIST finner du en indikatorlampe på forsiden. Den er vanligvis mørk. Når man trykker på knappen eller trekker i snoren vil den blinke grønt en gang som tegn på at den sender. Etter en liten pause vil den gi et kort oransje/rødt blink som indikerer at den er ferdig med varsling.

Dersom et eller annet er galt vil indikatorlampen blinke rødt.

Dersom indikatorlampen vedvarende veksler mellom rødt og grønt er det på tide å bytte batteriet.

FlexiBlink mottakere indikerer at en sender har svakt batteri på ulike måter avhengig av deres innebygde funksjonalitet.

Enkel feilretting

1. Ingen varsling
 - a. Blinker ikke grønt ved sending
 - i. Bytt batteri
 - b. Blinker grønt ved sending
 - i. Sjekk huskode.
 - ii. Prøv å flytte mottaker nærmere eller forsøk med en repeater.
2. Feil varsling
 - a. Still inn riktig ID med ID-velgeren.
3. Rødt/grønt blink
 - a. Bytt batteri

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs
Driftsspenning: 9 V høykapasitets
litiumbatteri
Frekvens: 142 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Rengjøring utført av bruker

Assistansealarmen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet bør ikke utsettes for direkte vannsprut.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt, bortsett fra batteriskift.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.