

Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon Type 1, m/ mini XLR HODEB1

Dette er en robust mikrofon som passer godt i undervisningsmiljøer og for personer med svak stemme. Den har “nyrekaraktistikk” som gir god immunitet mot feedback.
Regulerbar nakkebøyle – kan også brukes av barn.




Dok. nr.: 2487A
Dato: 2016-12-15

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Ta på deg mikrofonen

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

1. Juster vidden i nakken ved å trekke/skyve på bøylen.
2. Mikrofon-bommen kan tas løs. Juster plasseringen til mikrofonen er i linje med munnviken din.
3. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærmere og peker mot munnen din uten å komme i direkte kontakt med huden.
4. Sett kontakten i stemmeforsterkeren / mikrofonsenderen.

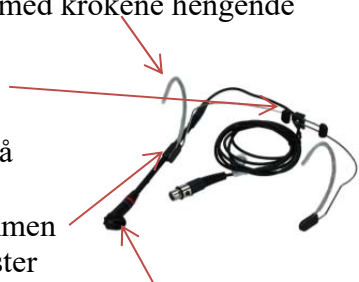

NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte "feedback" og kraftig hyling i høyttalerne.

Enkel feilretting

Hvis lyden er dårlig eller det hylar i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken!
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler / stemmeforsterker.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofon kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunke, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Leverandør

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord