

FlexiBlink

Varenr. 1546
HMS-nr.: 233431

Bevegelsessensor for takmontasje. PIRTAK



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 3439A
Dato: 2017.08.09

1. Innledning

PIR Tak er en sensor til bruk for å oppdage passasje gjennom et rom eller en gang. Sensoren monteres i taket og lager en usynlig avdeling av rommet/gangen. Ved passasje igjennom denne avdelingen, vil sensoren aktiveres.

PIR Tak kan ikke benyttes alene, men må tilkobles en FlexiBlink sender for å kunne sende beskjed videre til mottakere. PIR Tak fungerer kun sammen med tidsstyrte sendere med display, samt med vanlige sendere som ser ut som den på bildet under.




2. Oversikt

I pakken



Sensor med tilhørende borrelåstape og spritserviett.

Utvendig

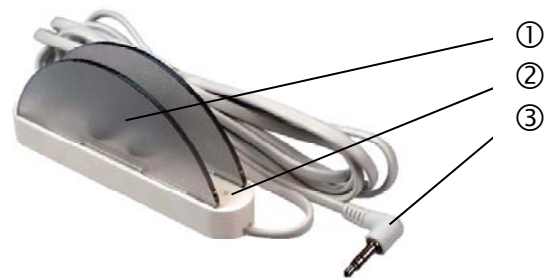

Figur 1 Sensor


- ① PIR Tak sensor.
- ② Skruehull for montering.
- ③ Kontaktplugg - 3,5 mm Jack for tilkobling til vertsprodukt.

3. Komme i gang

Montere PIR Tak

PIR Tak oppfatter når en person vandrer gjennom deteksjonsfeltet.

Deteksjonsfeltet kan tenkes som en stripe med bredde på ca 1 meter ved montering i 2,5meter høyde. Lengden på stripen vil være ca 4 meter i hver retning ut fra sensoren.

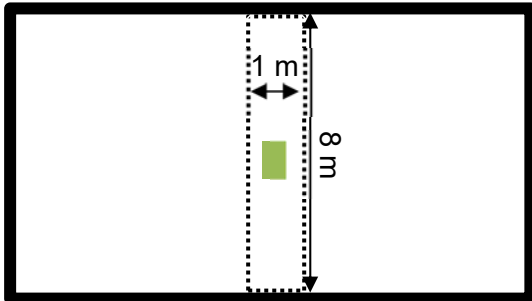

PIR Tak monteres i taket med medfølgende borrelåstape eller ved bruk av skruer. Husk å vaske festepunktet med spritserviett før montasje.



Viktig

Unngå å montere PIR Tak på steder der den kan påvirkes av direkte sollys.

PIR Tak kobles deretter inn i vertsproduktet med kontakt-pluggen. Vær obs på at det kan ta opp til ett minutt før PIR Tak er klar til bruk.

4. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Temperatur: -10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.



Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

5. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 180x50x20mm

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Bevegelse detekteres ikke	Sensor ser ikke i riktig retning	Juster sensoren slik at åpningen ser aktuelt område.
	Sensor er ikke klar.	Vent i opp til ett minutt etter første tilkobling.
	Oppsett i vertsprodukt	Kontroller at vertsprodukt registrerer aktiviteten. Dette indikeres forskjellig på forskjellige typer produkter.
	Løs tilkobling	Kontroller at kontakten er korrekt plagget inn i vertsproduktet. Dersom pluggen ikke er satt i korrekt. Ta den ut, vent 2 minutter og sett inn igjen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 3347 3347

