


Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon Type 3, m/ mini XLR HODEB3

Dette er en robust mikrofon som gir et godt og naturlig lydbilde.
Mikrofonen er liten og diskret og passer godt der lytterne er avhengig av munnavlesning.

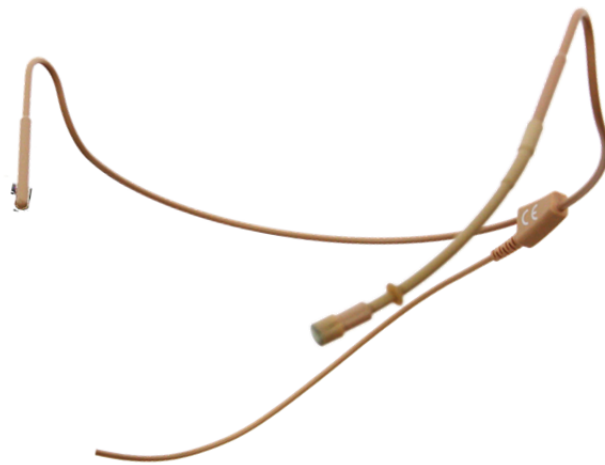


Dok. nr.: 2485A
Dato: 2016-12-15

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Ta på deg mikrofonen

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

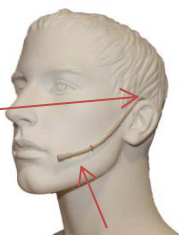

1. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærme og peker mot munnen din uten å komme i direkte kontakt med huden.
2. Hvis bøylene sitter løst kan det settes på en pakkestrikk på tvers av bøylene i nakken. Denne vil holde mikrofonen stødig.
3. Sett kontakten i stemmeforsterkeren / mikrofonsenderen.

NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte "feedback" og kraftig hyling i høyttalerne.

Enkel feilretting

Hvis lyden er dårlig eller det hylar i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken!
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler / stemmeforsterker.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofon kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkest, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Leverandør

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord