

FlexiBlink

Brukerhåndbok

Kontaktmatte uten sender

Art. nr. MATTE

HMS-nr.: 162290



MAN 2452 A1

Vestfold Audio AS
Sandefjord

FLEXIBLINK

Brukerhåndbok

Bruksområde

Tråkkematte MATTE er en del av FlexiBlink systemet. Den anvendes som en bryter som aktiverer FlexiBlink sender når man trækker på den. Tråkkematten brukes gjerne sammen med universalsender eller barnevakt.

Virkemåte

Tråkkematta brukes for å registrere om en person passerer et område hvor tråkkematta ligger. På tråkkematta er det montert en ledning med konektor. Dersom ledningen er tilkoblet FlexiBlink sender, vil varslingen kunne sendes trådløst til andre mottakere.

Tilkobling

Tråkkematta kobles normalt til en universalsender, barnevakt eller assistansealarm. Sett pluggen fra tråkkematta inn i signalinngang for potensialfri kontakt på senderen.

Produsent

Vestfold Audio AS
3234 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner nødvendig for sikker bruk

Bruksområde: Innendørs.
Størrelse: 39 x 70 cm.

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Tråkkematta må ikke brettes.

Plassering og montering

1. Tråkkematta legges normalt under matte/teppe på gulvet.
2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videreledning av varsel.
3. Monter senderen som beskrevet i senderens brukerhåndbok.
4. Test sensor og sender ved å trække på matta. Sjekk at mottakeren mottar.
5. Nå er Tråkkematta klar til bruk.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Rengjøring utført av bruker

Tråkkematta kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevar alltid tråkkematta flatt eller som levert fra oss. Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.