

APPS-L

Varsling på smarttelefon

APPS-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
FlexiApp-senderen	4
3. Komme i gang	5
Montering av FlexiApp-sender	5
FlexiApp-sender tilkoblinger	5
Sammenkoble enheter	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	6
Sammenkobling mislykkes	6
Avbryte sammenkobling	6
Nullstille sammenkoblingen	6
4. FlexiApp-senderen i drift	7
5. Installere FlexiApp	7
6. FlexiApp start	8
FlexiApp Menylinjen	8
Koble til FlexiApp-sender	8
Navngi AppSenderen	8
7. FlexiApp daglig bruk	9
HJEM	9
SENDERE	9
SØK	10
AVANSERT	10
Test	12
8. Viktig informasjon	12
Bruksbegrensninger	12
9. Resirkulering	12
10. Sikkerhet	13
11. Tekniske data	13
12. Samsvarserklæring	13
13. Feilsøking	14

1. Innledning



Med en FlexiApp-sender (APPS-L) installert i boligen, får du FlexiBlink LIFE-varsling rett til FlexiApp på smart-telefonen din. Denne løsningen er praktisk for personer "i farta" som har behov for varsling på steder der det ikke er FlexiBlink LIFE varslings-mottakere.

FlexiApp-sender mottar FlexiBlink LIFE varslings-signaler og sender dem videre via Internett til telefoner med FlexiApp. Mobiltelefonen må ha mobildata påslått eller være tilkoblet Internett via WiFi.

Opp til 10 smarttelefoner kan være registrert samtidig til FlexiApp-sender. Du kan registrere din FlexiApp til flere FlexiApp-sender, som for eksempel hjemme og på arbeidsplass.

FlexiApp finnes for både iPhone og Android-telefoner.

FlexiApp
Android og iOS

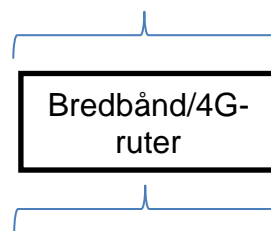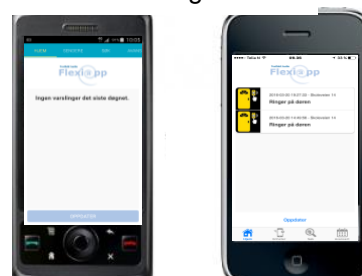

FlexiApp-sender
APPS-L


2. Oversikt

FlexiApp-senderen



Figur 1 Framside

- ① Rød lysindikator
- ② Grønn lysindikator
- ③ Blå lysindikator
- ④ Etikett med brukerinformasjon
- ⑤ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑥ Tilkobling bredbåndsruter
- ⑦ Tilkobling strømforsyning

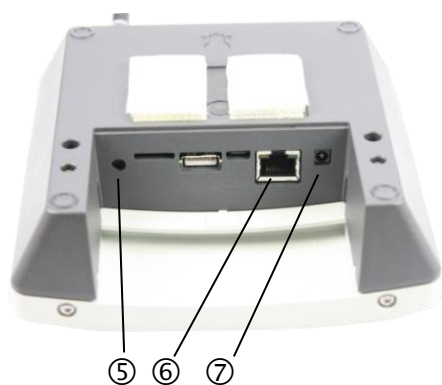

Figur 2 Bakside

3. Komme i gang

Montering av FlexiApp-sender

FlexiApp-sender må installeres på et sted der den er innen rekkevidde fra de FlexiBlink LIFE varslingsenderne den skal videresende fra.

Samtidig skal det være en plassering som tillater kablet tilkobling til bredbånds-ruter.

FlexiApp-senderen skal monteres på vegg med antennen opp. Benytt de medfølgende borrelåsene.

Rengjør flatene med spritservietten og vent 1 minutt. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Skru eventuelt FlexiApp-senderen opp på veggen. For å komme til skruehullene, skru av nederste frontlokk.

FlexiApp-sender tilkoblinger

1. Strøm

Koble strømforsyningen til FlexiApp-senderens strømkontakt, og sett strømforsyningen i kontakten på veggen.

2. Internett

Sett den ene enden av nettverkskabelen i FlexiApp-senderen og den andre enden i en ledig port i bredbånds-ruteren.



Tips

Vi anbefaler at du tar av lappen med PIN-kodene og klister den på baksiden av denne håndboken. Oppbevar PIN-kodene på et trygt sted.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


LIFE-knappen finnes i underkant på FlexiApp-sender, se figur 2.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

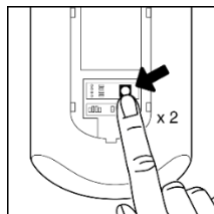

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

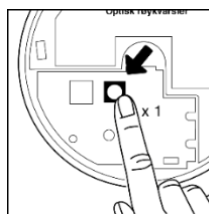

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

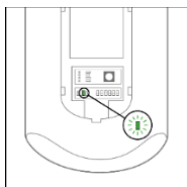

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den. Vennligst nullstill enheten.

Hvis indikatorlampen lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

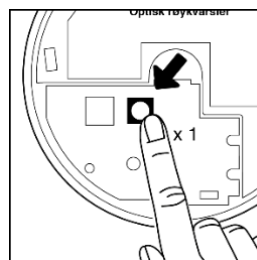

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

4. FlexiApp-senderen i drift

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren:

<i>Slukket</i>	IKKE KLAR
<i>Blinkende grønt</i>	I oppstart, eller sammenkobling
<i>Blått lys</i>	Klar
<i>Blått blink</i>	FlexiBlink LIFE radiotrafikk
<i>Blinkende rødt</i>	Ikke kontakt med skysserver.



Tips

Når FlexiApp-senderen er på og er klar til bruk, vil den blå lysdioden lyse.

5. Installere FlexiApp

For å motta varslinger på telefonen, må du installere vår FlexiApp.

FlexiApp finnes for både iOS (iPhone) og Android smarttelefoner, og den kan lastes ned fra AppStore og PlayButikk. Gjør slik:

3. Søk opp "FlexiApp" fra Vestfold Audio AS.
4. Installer og åpne FlexiApp.
5. Tillat mottak av varslinger
6. Startside gir deg nyttig informasjon:



7. Fortsett i kapittel 6 Koble til .

6. FlexiApp start

FlexiApp Menylinjen

FlexiApp fungerer likt på iPhone og Android-telefoner, men utseendet er litt forskjellig. Android har menylinjen i toppen, mens iPhone har den nederst.

HJEM	Viser varslinger
SENDERE	Slå på/av varslinger
SØK	Søke etter AppSender
AVANSERT	Avanserte funksjoner

Koble til FlexiApp-sender

Du kan koble deg til en FlexiApp-sender ved å søke den opp på lokalt WiFi, eller du kan legge den til manuelt med PIN-kode.


Med WiFi

1. Sjekk at WiFi er slått på og at du er tilkoblet det trådløse nettverket til bredbåndsruterer hvor FlexiApp-sender er tilkoblet. Til dette kreves det normalt et WiFi-passord.



Viktig
Systemet forutsetter at det er et trådløst nettverk (WiFi) i forbindelse med bredbåndsruterer for første gangs tilkobling til smarttelefonen.

2. Start FlexiApp og gå til «Søk»-siden for å søke opp FlexiApp-sender.

Du får nå opp en liste der FlexiApp-senderen vises med det navnet den er gitt på klistrelappen. Trykk på  for å koble smarttelefonen din til FlexiApp-senderen.



Legg til manuelt

- 1 Trykk på "Legg til appsender manuelt".
- 2 Skriv inn Bruker PIN-kode.

Navngi AppSenderen

- 1 Dersom du vil endre navnet på FlexiApp-senderen, kan du gjøre det nå. Navnet vises som en del av meldingen når du får en varslings.

- 2 Trykk "LEGG TIL" for å koble til FlexiApp-sender til FlexiApp med navnet du har gitt.

7. FlexiApp daglig bruk

Straks du har utført siste instruksjon i foregående avsnitt, kan du motta varslinger på smarttelefonen.




Smarttelefonen må ha tilgang til Internett over mobilt nettverk eller WiFi.

FlexiApp har en menylinje som beskrevet under:

HJEM

Når du trykker på FlexiApp-ikonet, eller når du trykker på et mottatt varsel, kommer du til HJEM-siden. Her vises de varslene du har mottatt på telefonen de siste 24 timene.

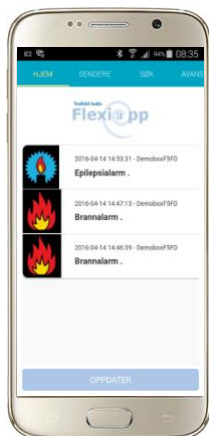

SENDERE

På denne meny-siden kan du velge hvilke varsler du vil motta fra FlexiApp-senderne telefonen er tilkoblet til.



Ved å velge Mottak "av", får du ingen varsler. Ved å velge "Motta kun alarmer", varsles du bare av alarmer. Dersom FlexiApp-senderen din er frakoblet serveren, får du også beskjed om dette.

"Avslutt" bryter tilkoblingen til denne FlexiApp-senderen og du må eventuelt gjenta kapittel 0 for å koble til igjen.



Tips

Hvis du har slått "Mottak" av, vil ingen varsler mottas eller vises på HJEM-siden.




Viktig

Varslingene i FlexiApp er underlagt telefonens basisvarslingsinnstillinger for lyd, vibrasjon og visning. Se telefonens bruksanvisning.


SØK

Velg denne siden hvis du vil koble deg til en ny FlexiApp-sender. Se kapittel 6 over.

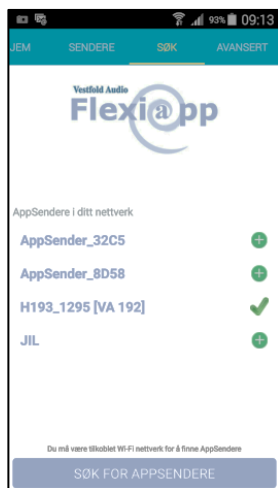

AVANSERT

Funksjonene på denne siden krever pålogging med PIN-kode. PIN-kodene finner du på lappen på FlexiApp-senderen. Disse funksjonene er for den avanserte brukeren.

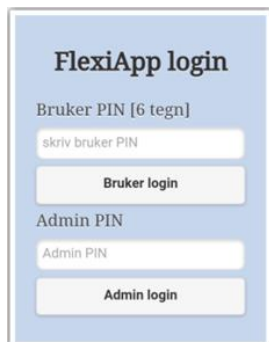

Det finnes to nivåer for pålogging:

Bruker login Tilgang bare til varslingshistorikk

Admin login Varslingshistorikk og administrator-funksjoner

Når du logger inn, kommer du først til denne siden med informasjon om versjon o.l.



Nederst finnes tilgang til avanserte funksjoner.


Varslinger

På denne siden vil du se varslings-historikk for en begrenset tidsperiode.

Enheter


For å få tilgang til denne fanen må du logge på som "Admin". Her kan du administrere telefonene som er koblet til FlexiApp-senderen.

Klikk på den telefonen du ønsker å gjøre noe med.

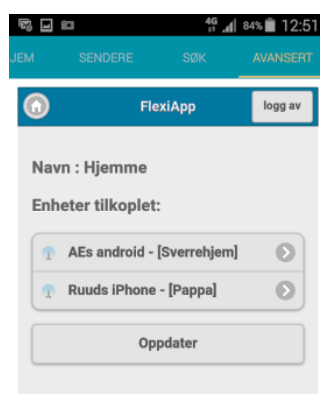

Du kommer da til denne siden:

Her kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til FlexiApp-sender.

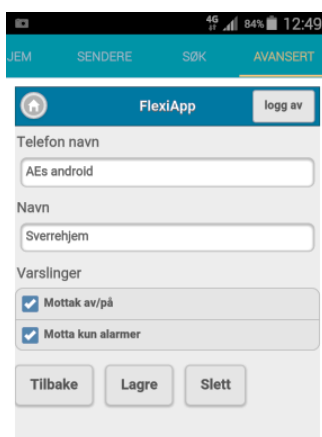


Trykk "Lagre" for å lagre endringene.


Trykk "Slett" for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.

Tilpasse

På denne siden kan du endre varslingstekst og varslingslyder fra det som er standard.

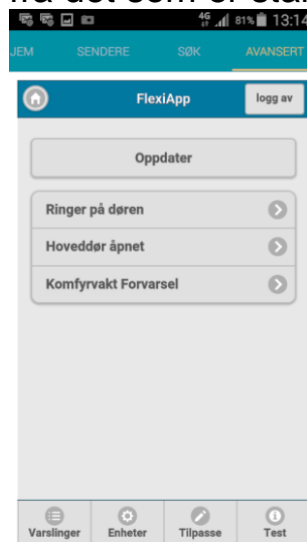

Alle typer varslinger som FlexiApp-senderen har mottatt fra varslingssendere og som er mottatt av FlexiApp er listet opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre.

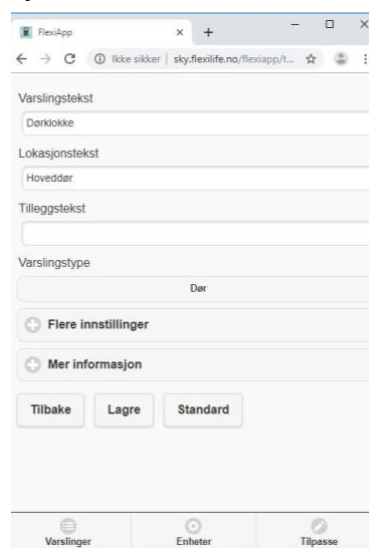

F.eks. kan du spesifisere hvilken dør det ringer på.


Velg hvordan varslet skal lyde fra menyen "Meldingstype".
Trykk "Lagre" for å lagre endringene.

Trykk "Slett" for fjerne varslings-typen fra listen.

Trykk "Standard" for å tilbakestille til fabrikkinnstilling.

Test

Under denne fanen kan du få systemet til å sende deg en test-alarmer.

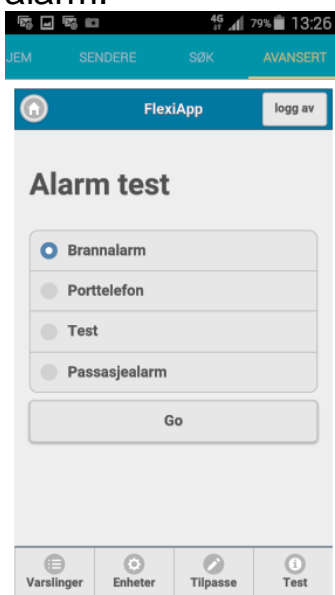

Du kan velge mellom 4 standard test-varslinger.
Velg en og trykk på "Go".

8. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

9. Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



10. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.



Tips

Husk å starte FlexiApp etter omstart av mobilen for å motta varsler.



Viktig

Tidsforsinkelser på varslinger kan oppleves og avhenger av Internett-forbindelse og mobilnettet.

11. Tekniske data

FlexiApp-Senderen:

Dim. (bxhxd): 140x140x40mm

Driftsspenning: 15VDC

LAN: 10/100Mbps

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85
MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

12. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
FlexiApp-senderen lyser ikke blått	Strømforsyningen er ikke tilkoblet.	Kontroller tilkoblingen.
	Det er ikke kontakt med bredbåndsruteren	Kontroller tilkoblingen til ruteren og at ruteren er på.
	Bredbåndsruteren har ikke kontakt med Internett.	Sjekk linjer.
FlexiApp finner ikke FlexiApp-senderen	WiFi er ikke tilgjengelig	Skru på WiFi til det samme nettet der FlexiApp-sender er tilkoblet.
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet WiFi-nettet.	Logg på WiFi.
Får ikke sammenkoblet	Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand	Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen
	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter.	Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.
	Feil rekkefølge på sammenkoblingen	Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun én gang på den nye enheten
Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp?	Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.
	Leter fortsatt etter nye enheter.	Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
FlexiApp mottar ikke varslinger	Varsling er avslått i FlexiApp.	Slå på varsling i FlexiApp, fane "Sendere".
	"Bare alarmer" er valgt.	Slå av "Bare alarmer" i FlexiApp.
	Mottak av varslinger er blokkert	Gå til Innstillinger: Tillat mottak av varslinger
	FlexiApp-senderen fungerer ikke.	Kontroller FlexiApp-senderens tilkoblinger.
	Får ikke grønt blinkende lys.	Sjekk rekkevidde mellom sendere og FlexiApp-senderen
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet FlexiApp-senderen	Koble til FlexiApp, fane "Søk".
	FlexiApp-senderne er ikke sammenkoblet med senderne i huset.	Sammenkoble FlexiApp-senderen med resten av utstyret i huset
	Mobildata/WiFi/Internett er ikke tilgjengelig.	Slå på mobildata og/eller logg på et WiFi-nett.
	Telefonen er satt i "flymodus".	Slå av "flymodus".

Varslinger mottas, men ingen lyd eller vibrasjon. FlexiApp varsler for sent	Smarttelefonen er satt til "lydløs"-modus.	Slå på lyd og/eller vibrasjon.
	Smarttelefonens strømsparing er aktivert.	Slå av strømsparingsfunksjonen.
	Smarttelefonen har vært utenfor dekningsområde.	Om mulig: Oppsøk områder med god dekning.
	Smarttelefonen er opptatt med å bytte mellom mobildata og WiFi.	Om mulig: Velg enten mobildata eller WiFi.
	Internett-linjen i boligen er ustabil.	Sjekk linje og tilgang.
	Smarttelefonen har andre app-er som stjeler prioritet.	Forsøk å slå av andre "app'er".

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

APPS-L Bruker PIN: _____

APPS-L Admin PIN: _____

Plass til **APPS-L** klistrelapp:



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

