

Bevegelsesvaktsender

BEV10-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
Utvendig	3
Batteriet	3
Under lokket	4
3. Komme i gang	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Tilkobling av signalgiver	6
Montering	6
Sette inn batteriet	6
4. I bruk	7
5. Viktig informasjon	7
Bruksbegrensninger:	7
6. Resirkulering	7
7. Sikkerhet	7
8. Tekniske data	7
9. Samsvarserklæring	7
10. Feilsøking	8

1. Innledning

Bevegelsvaksender BEV10-L er et produkt i FlexiBlink LIFE -serien.

FlexiBlink LIFE er et trådløst varslingssystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

BEV10-L har inngang for tilkobling av PIR-bevegelsessensorer, magnetbrytere eller mattebrytere. Varsling blir utløst når inngangen blir aktivert fra tilkoblet utstyr.

BEV10-L har innebygget mange forskjellige typer varsel om vandring, både for egenvarsling og for varsling til pårørende.

Varslingene er fordelt i to grupper:


- 1 *Daglige signaler*
- 2 *Alarmer*

Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i FlexiBlink LIFE varslingsmottakere, mens *Alarmer* alltid varsler med full lydstyrke.

BEV10-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.


2. Oversikt

Utvendig

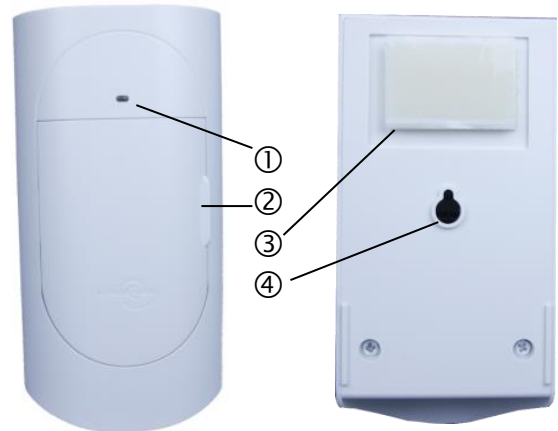

Figur 1 Forside

Figur 2 Bakside

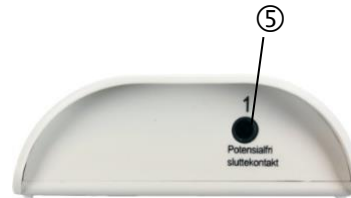

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkobling


- ① Lysindikator
- ② Løkk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Signalinngang for FlexiBlink sensorer og potensialfrie brytere. (Sammenkobling av lederne gir signal.)

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Under lokket

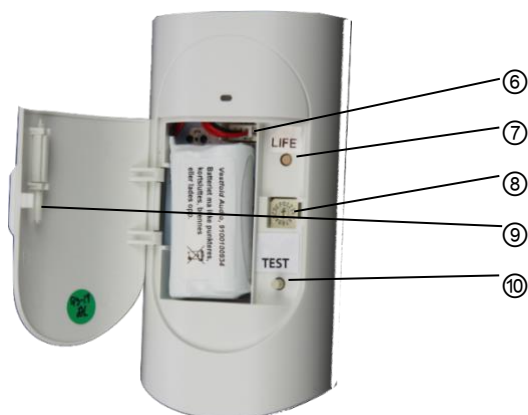

Figur 4 Under lokket

- ⑥ Batterikontakt
- ⑦ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑧ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑨ Verktøy for innstillinger
- ⑩ Testknapp

3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på DPS10-L. Se figur 4 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

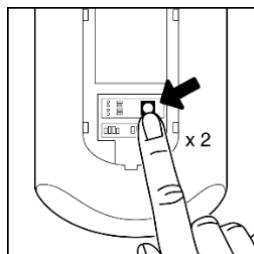

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

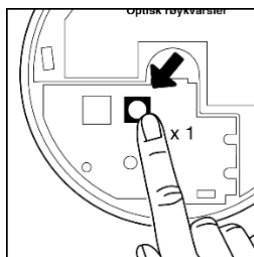

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

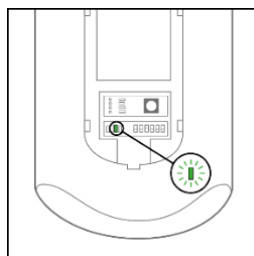

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

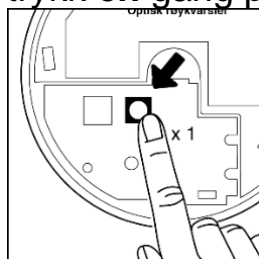

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Velg funksjon (ID-velger)

BEV10-L kan varsle mange typer vandring. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsel ved signal PÅ	Type
0	Vandring inne	Daglig
1	Vandring ute	Alarm
2	Det er natt – ikke gå ut	Daglig
3	Det er natt – gå til sengs	Daglig
4	Passasjealarm	Daglig
5	Passasjealarm 1	Daglig
6	Passasjealarm 2	Daglig
7	Barnet har stått opp	Daglig
8	Barn 1 har stått opp	Daglig
9	Barn 2 har stått opp	Daglig
A	Opplest klokke (*1)	Daglig

*1 - Når denne benyttes, forteller IRIS Touch hva klokka er

Tilkobling av signalgiver

PIR-Mini, PIR Gardinsensor, trykknapper og relé-signaler kan kobles til signalinngangen.

Når PIR-elementer blir tilkoblet, trenger de noen sekunder på å stabilisere seg. Dette gjør at en kan oppleve falsk alarm fra BEV10-L rett etter tilkobling av PIR-elementet. Etter et halvt minutt fungerer PIR-elementet stabilt.

Montering

BEV10-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skruer til veggen gjennom festehullet under batteriet.

Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.



Ved tilkobling av batteri kan BEV10-L blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.

Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Tips

Hvis produktet ikke er i daglig bruk, bør man vurdere rutiner for test av systemet for å sikre at alt fungerer.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3 V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	BEV10-L får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Tilkoblingen til signalkilden feiler	Kontroller tilkobling til signalkilden
	Batteriet i BEV10-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	BEV10-L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom BEV10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Falsk varslings	PIR-elementet har ikke stabilisert seg	Etter tilkobling trenger PIR-elementet opp til 25 sek. før det blir stabilt. Etter dette fungerer det stabilt.
Det lyser ikke grønt når signalet aktiveres.	BEV10-L oppfatter ikke signalet.	Kontroller at kilden gir riktig signal til valgt inngang.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
PIR-sensoren virker ikke.	Strømbegrenser i BEV10-L er utløst.	Koble fra PIR-sensoren Trykk og hold testknappen i 10 sekunder. Slipp knappen. Koble til PIR-sensoren igjen.
Det blinker rødt/grønt i BEV10-L	Batteriet i BEV10-L er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 324 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

