

IRIS SOL KALENDER MED PÅMINNELSER

Bruksanvisning



IRIS SOL er en elektronisk kalender med talende klokke og valgbar visning av informasjon som analog eller digital klokke, dag, dato, døgnoorientering og dagsplan.

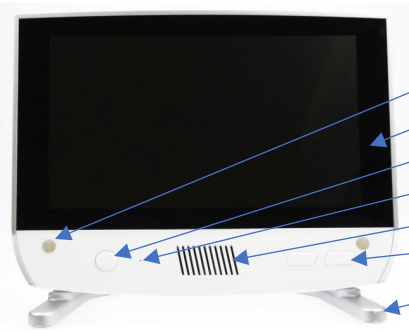


Påminnelser legges direkte inn i kalenderen, eller over nett via sikker webportal. Påminnelsene varsles med lyd, lysblink, symboler og eventuelt talemelding.

IRIS SOL har valgbare visningsinnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner, slik at den enkelt kan tilpasses brukeren.

IRIS SOL kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen. Et innebygget batteri holder på innstillingene ved strømstans.

IRIS SOL kan viderefremde varsler og påminnelser til armbåndsklokken NORA SOL.

IRIS SOL fungerer også som varslingsmottaker for utvalgte FlexiBlink LIFE produkter, som bl.a. brannvarsling, dørklokke og fjernstyrt oppløsning av klokke.

	<p>Front:</p> <ul style="list-style-type: none"> Varsel-lys (høyre og venstre side) Skjerm med touch HJEM-knapp Mikrofon for taleinnspilling Høytaler Volum +/- Avtakbar fot
	<p>Tilkoblinger bak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lysindikator Life-knapp Funksjonsbrytere Tilkobling strømforsyning
	<p>Tilkoblinger venstre side:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ethernet (for tilkobling til ruter) Ikke i bruk USB Veggbrakett

1. KOMME I GANG

IRIS SOL kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrus opp på vegg med den medfølgende braketten.

Sett strømforsyningen i stikkontakten og plugg ledningen inn i IRIS SOL. Hvis du skal legge inn påminnelser via fjerntilgang/ internett må internettkabel kobles til før strømforsyning. Du vil nå se at skjermen starter. Første gang må du velge ønsket språk og skjermen vil starte på nytt. Velg så dato og klokke. IRIS SOL er nå klar til bruk. Hvis du har annet FlexiBlink LIFE utstyr, gå til kap. 6, for sammenkobling.

Eksempler på tilpasning:

	
<p>Informativ: Nordlys bakgrunnsbilde - digital</p>	<p>Dagsplan: Stein bakgrunnsbilde - uthevet analog</p>
	
<p>Dagsplan: Turkis bakgrunnsbilde - analog</p>	<p>Dagsplan: Kontrast – uthevet analog</p>

2. DAGLIG BRUK

Klokke:

IRIS SOL har tilgjengelig ulike visninger av klokke, både analog og digital. Se kap. 4 for hvordan du endrer klokkevisning. Ved aktivert talende klokke, vil tidspunkt, tid på døgnet og/eller dag leses opp når du trykker på skjermen.

Justere volum:

Benytt volumknapper (pluss/minus) på høyre framside av IRIS SOL for å justere lydstyrke på daglige varslinger.

VIKTIG! Brannalarm varsles alltid med full lydstyrke.

Påminnelser:

Påminnelser vises som et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker det i varslingslysene. Hva som vises ved siden av symbolet for påminnelsen, bestemmes av visningsinnstillingene. Påminnelsen blir stående på skjermen i 30 minutter.

Hvis man tar på skjermen, vil klokken vises med symbol for at en påminnelse er aktiv. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen. Nye påminnelser i denne perioden vil «ta over».

Varsling:

IRIS SOL fungerer også som varslingsmottaker for FlexiBlink LIFE produkter montert i hjemmet. Hendelser og alarmer varsles automatisk med lyd, lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert. En personlig talemelding ved brannalarm kan være spesielt gunstig for personer som kan ha vansker med å orientere seg ved akutte hendelser.




Ved å ta på skjermen innen to minutter etter at varslingen er ferdig, vil du se hvilket varsel som ble vist. Ønsker du å se på klokken i denne perioden – trykk på **HJEM**-knappen.


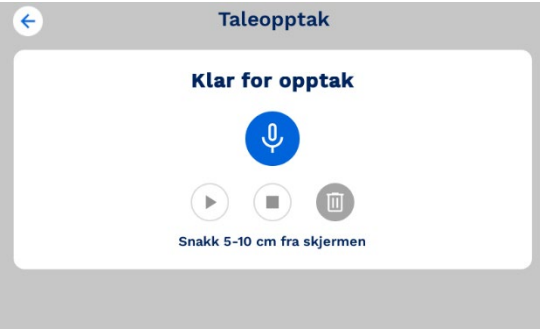


Avbryte varsel:

Dersom man ønsker å stoppe et pågående varsel, kan man berøre skjermen eller trykke på HJEM-knappen. Varselet vil stoppe umiddelbart. Dersom en brannalarm stoppes på denne måten, vil kommende, nye, alarmer innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

3. PÅMINNELSER

Trykk på **HJEM**-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen.

	<p>Trykk på ikonet for Påminnelser for å få fram listen med påminnelser.</p> <p>Ikonet kan skjules for å låse påminnelserfunksjonen. Dette bestemmes under Innstillingene for påminnelser.</p>
	<p>Trykk på + symbolet for å legge til en påminnelse.</p>
	<p>IRIS SOL har noen ferdige forslag til påminnelser man kan ta utgangspunkt i.</p> <p>Trykk på et av ikonene. Du får nå fram bildet for å legge inn en påminnelse.</p> <p>Hvis du ikke ønsker symbol, kan du trykke på Symbol-knappen og velge et uten symbol.</p>

	<p>Det er to linjer for tekst – tittel må alltid fylles inn.</p> <p>Trykk på Symbol-knapp til høyre for tittel for å endre symbol som skal vises sammen med teksten.</p> <p>Trykk på Tale-knapp for å snakke inn din egen talemelding.</p> <p>Velg startdato og tidspunkt og om påminnelsen skal repeteres. Tittel er max. 16 tegn og beskrivelse max. 22 tegn. Tittel vises i dagsplan.</p>
	<p>Trykk på Opptaks-knapp for å starte opptak av talemelding til påminnelse. IRIS SOL teller ned og opptaket starter. Du kan legge inn en melding på opptil 10 sekunders lengde. Prat inn i mikrofonen med normal stemme på 5-10 cm avstand. Opptaket stopper når 10 sekunder har gått eller du trykker på Stopp. Trykk på Spill av-knapp for å lytte til opptaket. For å spille inn en ny talemelding, må en evt. gammel slettes først. Trykk på Søppelbøtte for å slette gammel talemelding.</p>
	<p>-Trykk på Datofeltet for å legge inn dato for påminnelsen. Trykk Lagre.</p> <p>-Trykk på Tidsfeltet for å legge inn klokkeslettet for påminnelsen. Trykk Lagre.</p>
	<p>Repetisjon</p> <p>Hvis du ønsker repetisjon, trykk på Ingen repetisjon for å endre.</p>

	<p>Her finnes 4 hurtigvalg for repetisjon som benytter tidspunktet som er lagt inn som utgangspunkt.</p> <p>Trykk Lagre eller Pil tilbake (avbryt).</p>
	<p>Alternativt kan man velge Daglig, Ukentlig eller Månedlig repetisjon.</p> <p>Velg hvilke dager påminnelsen skal repeteres og eventuelt intervall. Man kan også tidsbegrense varslingene innenfor klokkeslett og dato.</p> <p>Trykk Lagre eller Pil tilbake (avbryt).</p>
	<p>Når du har fullført alle innstillingene, trykker du Lagre.</p>
	<p>Man kan aktivere/ deaktivere hver enkelt påminnelse med den blå skyvebryteren til høyre i listen.</p> <p>Hvis en påminnelse repeterer seg, er det et symbol for repetisjon mellom dato og skyvebryter. Det vises inntil 5 påminnelser per side.</p>
	<p>Eksempel på hvordan påminnelse vil se ut med tittel, beskrivelse, symbol og klokkeslett.</p>

ENDRE EN PÅMINNELSE

Trykk på **HJEM**-knappen og så trykk på ikonet for påminnelser nede til venstre på skjermen. Det kan være flere sider med påminnelser, der det vises 5 per side.

Trykk på den påminnelsen du ønsker å endre på.

Gjør de endringene du ønsker og trykk **Lagre**.



SLETTE EN PÅMINNELSE

Trykk på **HJEM**-knappen og så trykk på ikonet for påminnelser nede til venstre på skjermen.


Trykk på den påminnelsen du ønsker å slette. Trykk så på **søppelbøtte**-ikon for å slette.

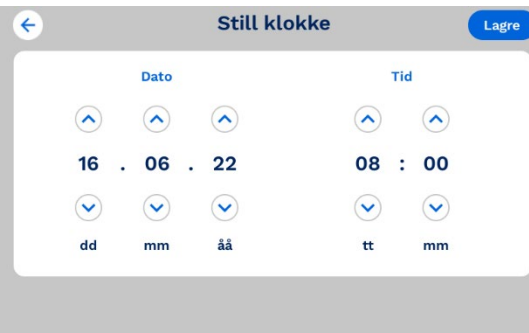

4. MENY FOR INNSTILLINGER

Under innstillingsmenyen kan man endre klokke/dato, utseende, påminnelser, lysstyrke, samt se systeminformasjon og hvilke funksjoner som er valgt. Her kan man også velge Fjerntilgang for å administrere kalenderen eksternt.

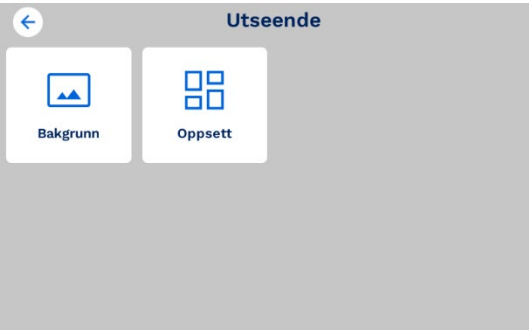
	<p>Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre høyre hjørne.</p> <p>Trykk på Innstillinger-ikonet.</p> <p>Hvis du får melding Skjerm er låst må bryter 5 på baksiden av IRIS SOL skyves ned (fra ON til OFF).</p>
	<p>Innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.</p>

Innstillinger: Klokke

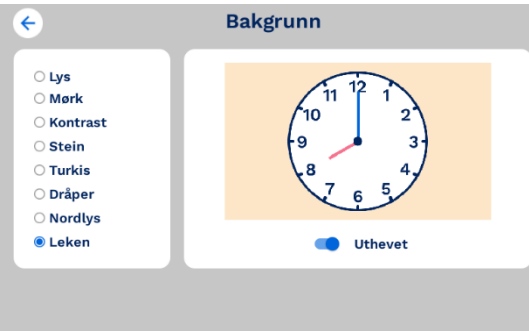
	<p>Under klokke meny kan man stille klokke og dato, eller andre innstillinger som talende klokke, sommertid og nattmodus.</p>
---	---

	<p>Still klokke</p> <p>Bruk Pilknappene for å endre dato og klokke.</p> <p>Trykk på Lagre for å lagre innstillingen eller Pil tilbake for å avbryte</p>
	<p>Talende klokke</p> <ul style="list-style-type: none"> -Slå talende klokke på eller av. -Velg om informasjon i talemeldingen skal begrenses til det som vises på skjermen. -Velg om talende klokke skal ha analog eller digital opplesning. Analog klokke runder av til nærmeste 5 minutter. <p>Automatisk sommertid</p> <p>Nattmodus</p> <p>Her kan du selv definere tidsrom for natt. Standardinnstillingene er kl. 00:00 til 06:00. Gyldig valg for start av nattestid er mellom kl. 18.00 og 00:00, og start av dagtid er mellom kl. 05:00 og 10:00.</p>

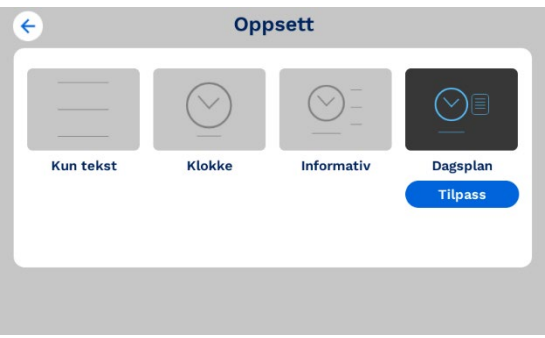


Innstillinger: Utseende





	<p>På denne siden finner man innstillinger av utseende (bakgrunn og oppsett).</p> <p>Menyfarge er lys eller mørk avhengig av hvilken bakgrunn man har valgt</p> <p>Denne bruksanvisningen har leken bakgrunn og lys menyfarge.</p>
---	--

Innstillinger: Utseende - Bakgrunn

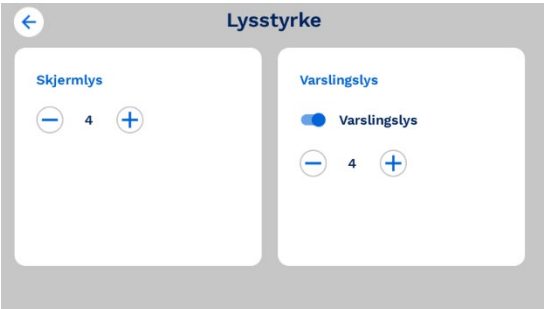
	<p>Her velges utseendet til klokken. Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger.</p> <p>Klokkeskiven har to valg, standard og uthevet.</p> <p>Innstillingen lagres automatisk.</p>
---	--

Innstillinger: Utseende - Oppsett

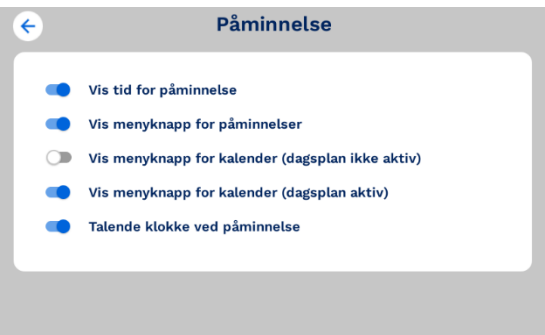
	<p>Man kan velge mellom 4 oppsett for hvordan klokken skal framstå:</p> <p>Kun tekst - her vises dag og digital klokke, periode på døgnet eller dato.</p> <p>Enkel klokke - her vises en stor klokke med valgbar informasjon i underkant.</p> <p>Informativ - her vises klokken med valgbar informasjon i 5 felt.</p> <p>Dagsplan - her vises klokken sammen med oversikt over dagens kommende påminnelser.</p> <p>Alle visningene kan tilpasses.</p>
	<p>Oppsett klokke</p> <p>Nå vises forsidebildet med blå Penn-ikoner på de plasseringen som kan endres.</p> <p>Når du trykker på et Penn-ikon, vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.</p>
	<p>Oppsett dag</p> <p>Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt.</p> <p>Trykk på de hvite Pilene øverst på skjermen for å se hva som skal vises på dag og natt.</p>
	<p>Oppsett natt</p> <p>Trykk på Penn-ikon for å endre visning mellom klokke og bilde.</p> <p>Hvis du velger Bilde, er det en sol for dagtid og en måne og stjerner for natt. Ingen annen informasjon som f.eks. klokke vil vises.</p>

	<p>Bilde for natt (i stedet for klokke).</p> <p>Nattmodus benyttes først og fremst for de som vil ha symboler for døgnorientering i stedet for klokkevisning.</p> <p>Dette gjøres i Innstillinger, Utseende, Oppsett og Tilpass.</p>
	<p>Bilde for dag (i stedet for klokke).</p>
	<p>Dagsplan viser oversikt over dagens kommende påminnelser, dersom dette er valgt under registreringen av selve påminnelsen(e) og dagsplan visning er valgt.</p>
	<p>Dersom man ikke benytter Dagsplan som fast visning på skjermen, kan man enkelt få oversikt over kommende aktiviteter ved å trykke på Hjem-knappen og deretter velge Kalender.</p> <p>For å få tilgang til Kalender må knapp for denne være slått på (se avsnitt Innstillinger: Påminnelser).</p>


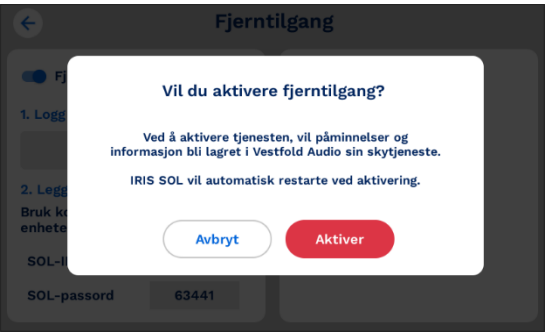

Innstillinger: Oppsett

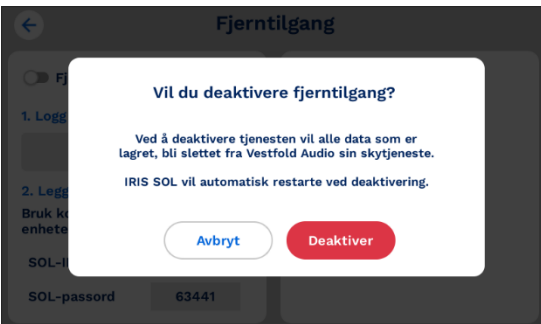

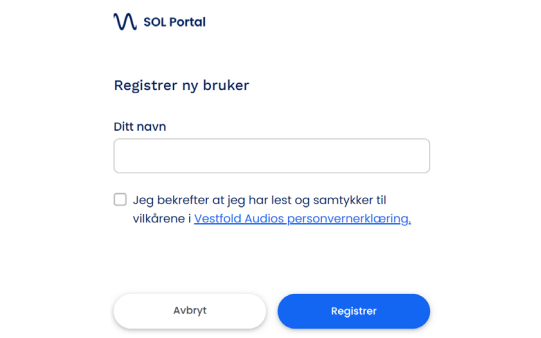
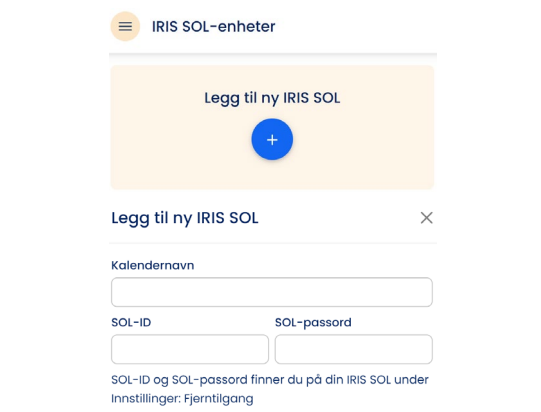
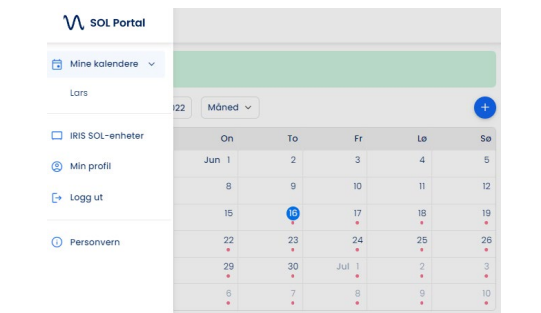
	<p>Her velges:</p> <ul style="list-style-type: none"> -skjermens lysstyrke -om varslingslys skal være av eller på -styrken på varslingslys <p>Innstillingene lagres automatisk.</p>
---	--

Innstillinger: Påminnelser

	<p>Her kan du velge om tidspunkt skal vises i påminnelsesbildet, om meny-knappen (ikonet) og menyknapp for kalender skal vises på skjermen, og om klokken skal leses opp ved påminnelser.</p> <p>Innstillingene lagres automatisk.</p>
---	--



Innstillinger: Fjerntilgang & Portal

	<p>IRIS SOL - fjerntilgang</p> <p>Her gir man tilgang til støttepersoner for å administrere påminnelser eksternt via sikker webportal. Inntil 3 brukere pr. IRIS SOL. Iris Sol må være koblet til internett, enten via nettverkskabel eller via produkt 1928 for trådløs tilgang. Se tilbehør kapittel 7. Internettkabel må kobles til før man kobler til strøm for å få tildelt IP-adresse. Trykk på knappen Fjerntilgang for å aktivere tjenesten.</p>
	<p>IRIS SOL – aktiver fjerntilgang</p> <p>Ved å aktivere tjenesten fjerntilgang vil påminnelser og informasjon fra IRIS SOL bli lagret i Vestfold Audio sin skytjeneste. Når fjerntilgang er aktivert vil SOL-passord bli synlig.</p>
	<p>IRIS SOL – slette fjernadministrator</p> <p>Når en støtteperson har knyttet seg til IRIS SOL, vil navn og mobilnummer stå oppført her. Her kan man også slette eventuelle tilknytninger. Trykk på Slett på aktuell fjernadministrator (IRIS SOL må være tilknyttet internett). Nytt SOL-passord blir generert, så tidligere fjernadministratorer ikke kan logge seg inn på nytt, uten å få nytt SOL-passord.</p>

	<p>IRIS SOL – deaktivere Fjerntilgang</p> <p>Hvis du ønsker å deaktivere fjerntilgang så trykker du på Fjerntilgang-knappen. Ved deaktivering vil alle data som er lagret på Vestfold Audio sin skytjeneste bli slettet.</p> <p>IRIS SOL vil starte på nytt etter at man trykker Deaktiver.</p>
	<p>Portal - innlogging</p> <p>Gå til portalen, sol.vestfoldaudio.no/ på din datamaskin eller mobiltelefon og følg instruksjonene.</p> <p>Benytt mobilnummer til den som skal betjene portalen (den som skal legge inn påminnelser). Engangskode vil bli sendt pr. SMS.</p>
	<p>Portal - innlogging</p> <p>Registrer navnet ditt.</p> <p>Navnet ditt vil bli synlig under fjerntilgang på IRIS SOL.</p>
	<p>Portal – legge til ny IRIS SOL</p> <p>Når du er innlogget, må du legge til ny IRIS SOL den første gangen. Trykk på +</p> <p>Under kalendernavn navngir du IRIS SOL kalenderen med det navnet du ønsker. Legg så til SOL-ID (6 tegn) og SOL-passord (5 tegn) som er oppgitt på aktuell IRIS SOL, som vist under Fjerntilgang-menyen. Trykk på Legg til.</p>
	<p>Portal – kalender</p> <p>Har du flere kalendere (IRIS SOL) tilknyttet, kan du veksle mellom dem ved å klikke oppe til venstre, Mine kalendere.</p>

	<p>Portal – kalender</p> <p>Velg mellom måneds- eller ukesvisning.</p> <p>Trykk for å legge inn påminnelser med eventuell repetisjon.</p> <p>Symbol for repetisjon </p>
	<p>Portal – ny påminnelse</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tittel er inntil 16 tegn -Beskrivelse er inntil 22 tegn -Velg hvilket symbol som skal være med i påminnelsen -Sett startdato og tidspunkt -Vis i dagsplan er aktiv -Aktiver påminnelse er aktiv: for repeterende påminnelse kan man deaktivere den i perioder <p>Velg Lagre, Repetisjon eller Avbryt</p>
	<p>Portal – ny påminnelse med repetisjon</p> <ul style="list-style-type: none"> -Under Repeteres kan man velge Ingen repetisjon, Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig. Avhengig av hvilken man velger får man ulike valgmuligheter. -Tidsintervallet for repetisjon er mellom 00:00 og 23:59, men kan gjentas flere dager eller uker. -Når skal påminnelsen avsluttes, Aldri eller en sluttdato? <p>Velg Lagre, Påminnelse eller Avbryt</p>


Innstillinger: NORA SOL

 <p>The screenshot shows the 'NORA SOL' settings page. At the top, there is a back arrow and the title 'NORA SOL'. Below that, a message reads 'Få påminnelser sendt direkte til din NORA SOL-kalenderklokke'. A prominent blue button labeled 'Søk etter NORA SOL' is centered on the screen.</p>	<p>For å få påminnelser direkte til din NORA SOL armbåndskalender, må den først være sammenkoblet i samme LIFE-nett, se sammenkobling. NORA SOL må stå på, og trykk så på Søk etter NORA SOL på IRIS SOL. IRIS SOL vil søke etter tilgjengelige NORA SOL i samme LIFE-nett. Velg aktuell NORA SOL ved hjelp av serienummer (SN). SN finner du på baksiden av eller i Info-meny på NORA SOL.</p>
 <p>The screenshot shows the 'NORA SOL' settings page after a search. It displays the same message as above. Below it, a search result is shown in a box: 'NORASOL SN: 1860100330' with a red 'Slett' button. At the bottom, there is a toggle switch labeled 'Lås meny på NORA SOL' which is currently turned off.</p>	<p>Etter at NORA SOL er tilknyttet, kan man aktivere Lås meny på NORA SOL. Låsen kan bare deaktiveres med IRIS SOL når NORA SOL er innenfor dekning. Menylås blir midlertidig deaktivert hvis man kobler til lader. Kun 1 NORA SOL kan være tilkoblet IRIS SOL. Ved eventuelt bytte til annen NORA SOL, må den gamle slettes før man kan legge den til.</p>


Innstillinger: System

 <p>The screenshot shows the 'System' settings menu. It features a back arrow and the title 'System'. There are five menu items represented by icons: 'Oppgrader' (download icon), 'Nullstill' (refresh icon), 'FlexiBlink LIFE' (bell icon), 'Språk' (globe icon), and 'Systeminfo' (info icon).</p>	<p>IRIS SOL er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, og det er ingen lisenser e.l. som må fornyes.</p>
--	--

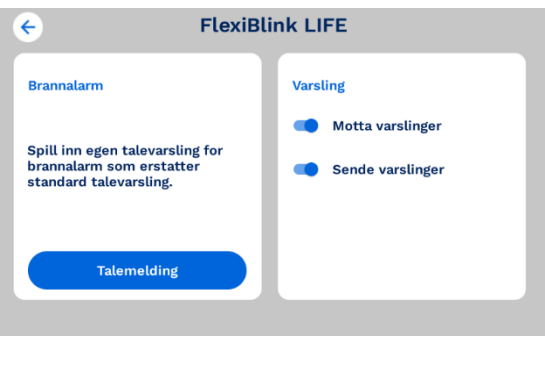
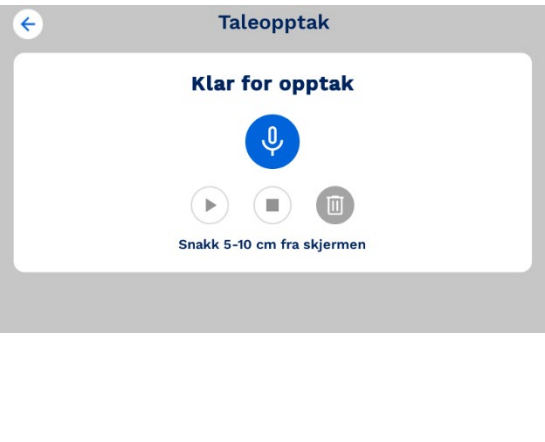
Innstillinger: System - Oppgradering

 <p>The screenshot shows the 'Oppgrader' (Upgrade) settings screen. It has a back arrow and the title 'Oppgrader'. Two blue buttons are visible: 'Oppgrader via USB' and 'Oppgrader via internett'. At the bottom, the IP address '10.100.49.130' is displayed.</p>	<p>Programvaren (SW) kan oppdateres, enten via USB eller internett (internett enten via kabel til ditt lokale nettverk eller ved å bruke IRIS SOL Fjernadministrasjon).</p> <p>Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.</p>
--	---

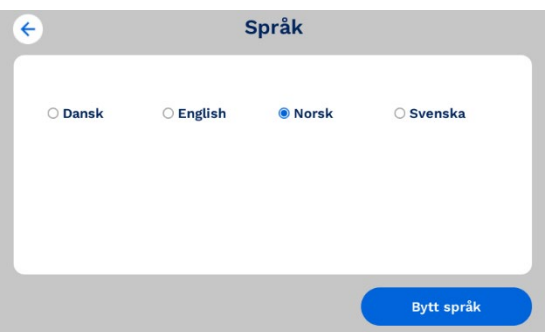
Innstillinger: System - Nullstill

	<p>IRIS SOL kan nullstilles til fabrikkstandard her.</p> <p>Alle innstillinger og tilkoblinger fjernes, og enhet kan utleveres til ny bruker.</p>
---	---

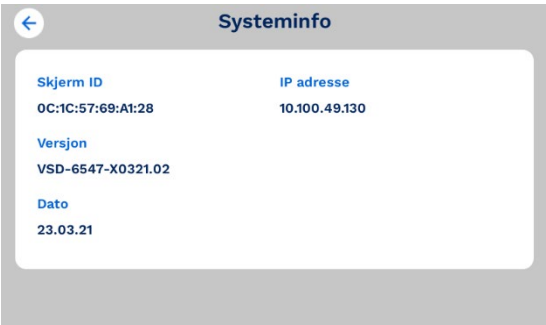
Innstillinger: System - FlexiBlink LIFE

	<p>Når Motta varslinger står på, vil IRIS SOL motta varslinger fra FlexiBlink LIFE systemet.</p> <p>Når Sende varslinger står på, vil det sendes varsel til FlexiBlink LIFE mottakere når en påminnelse inntreffer.</p> <p>Du kan spille inn egen talemelding for brannvarsling.</p>
	<p>Trykk på Opptaks-knapp for å starte opptak av talemelding ved brannalarm. IRIS SOL teller ned og opptaket starter. Du kan legge inn en melding på opptil 10 sekunders lengde. Prat inn i mikrofonen med normal stemme på 5-10 cm avstand. Opptaket stopper når 10 sekunder har gått eller du trykker på Stopp. Trykk på Spill av-knapp for å lytte til opptaket. For å spille inn en ny talemelding, må en evt. gammel slettes først. Trykk på Søppelbøtte for å slette gammel talemelding.</p>

Innstillinger: System - Språk

	<p>Her kan du endre språk på enheten. Når du har endret språk, vil enhet starte på nytt.</p> <p>Ta kontakt med Vestfold Audio ved behov for flere språk.</p>
---	--

Innstillinger: System - Systeminfo

	<p>Her vises informasjon om versjoner og evt. internett-tilkobling. Dette er informasjon som benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.</p>
---	---

5. SKJERMLÅS

Med funksjonsbryter 5 på baksiden av IRIS SOL kan du aktivere/ deaktivere skjermlås og volumjustering. Da vil brukeren ikke få tilgang til å endre innstillinger. Volum og innstillinger låses til gjeldende nivå. Låsing aktiveres ved å skyve bryter 5 til ON. Knapper for Påminnelser og Kalender kan fjernes/ legges til under Innstillinger: Påminnelse.

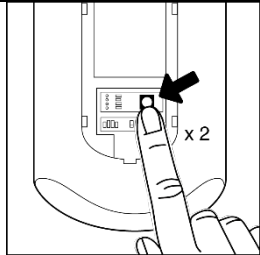
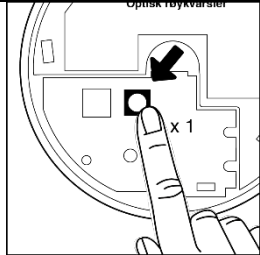
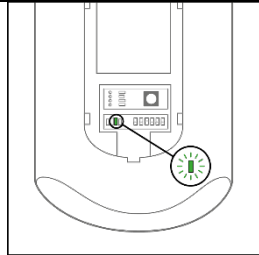


6. SAMMENKOBLING

Hvis du ønsker å benytte IRIS SOL sammen med varslingsprodukter i FlexiBlink LIFE-serien, må du sammenkoble enhetene.

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på **LIFE**-knappen. **LIFE**-knappen finnes under bak-lokket på IRIS SOL.

Sammenkoble første gang

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk Test-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk 2 ganger på **LIFE**-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på **LIFE**-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk **Test**-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling mislyktes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den. Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt (se nedenfor).

Avbryte sammenkobling

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på **LIFE**-knappen.

Nullstille sammenkoblingen

Trykk 5 ganger på **LIFE**-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med vekselvis røde og grønne blink.

7. TILBEHØR

IRIS SOL kan samvirke med utvalgte produkter i FlexiBlink LIFE -serien for å gi brukeren ekstra påminnelser og betjeningshjelp.

			
IRIS SOL Fjernadministrasjon Art.nr: 1928 HMS: 301388	NORA SOL Armbåndskalender Art.nr: 1927 HMS: 301387	Optisk Røykvarsler Art.nr: 1655 HMS: 253529	Termisk Brannvarsler Art.nr: 1667 HMS: 289756
Modul som gjør det mulig å fjernstyre IRIS SOL uavhengig av internettilgang hos brukeren. Tilkobles direkte til hovedprodukt.	Armbåndsklokke med påminnelser. Synkroniseres med IRIS SOL	Optisk røykvarsler som aktiveres ved røyk. ID-bryter for rom-velger. Batteri som varer hele røykvarslerens levetid (10 år)	Termisk brannvarsler som aktiveres av varmen fra en brann. ID-bryter for rom-velger. Batteri som varer hele brannvarslerens levetid (10 år)
			
BRANSENDER Art.nr: 1638 HMS: 253469	AURORA Art.nr: 1648 HMS: 253466	BACKUP Art.nr: 1948 HMS: 301389	ELLA Art.nr: 1671 HMS: 253472
Audiodetektor for eksisterende brannalarmsystem (uten galvanisk tilkobling)	Varsler når det er en aktiv påminnelse på IRIS SOL	Nødstrømsbatteri til IRIS SOL og IRIS MÅNE	Armbåndssender for fjernstyrt opplasing av klokke



FLEXIKNAPP

Art.nr: 1645

HMS: 253473

Knapp for dørklokke
eller fjernstyrt
opplesning av klokke

8. VIKTIG INFORMASJON

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

TEKNISKE DATA

BxHxD (uten veggfeste og fot):	218x165x40 mm
Vekt uten strømforsyning:	800 g
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Driftsspenning:	15 VDC
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarerklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Enheten virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontroller at strømforsyning står i en stikkontakt som har strøm og at den er plugget helt inn i enheten
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken. Se Innstillinger: Klokke: Still klokke
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Kommer ikke inn i innstillingsmenyen.	Bryter nr. 5 på baksiden står opp (ON)	Skyv bryter 5 ned (til OFF)
Kan ikke stille lydstyrken	Bryter nr. 5 på baksiden står opp (ON)	Skyv bryter 5 ned (til OFF)
Talende klokke virker ikke	Funksjonen er slått av i innstillinger	Gå til Innstillinger: Klokke: Innstillinger og aktiver Talende klokke .
Påminnelse varsles ikke/ kommer ikke opp	Påminnelsen er ikke aktiv	Aktiver påminnelsen med skyveknappen i oversikten over påminnelser.
	Tidspunktet er feil	Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dato og tid
Påminnelsen repeteres ikke	Repetisjon er ikke satt til riktig dag/ dato/ klokkeslett	Kontroller at påminnelsen er satt med riktig repetisjon
Får ikke sammenkoblet	Indikatorlampe lyser rødt etter sammenkoblingsforsøk	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter. Nullstill sammenkobling
	Indikatorlampe blinker rødt etter sammenkoblingsforsøk	Sammenkobling mislykkes. Vennligst prøv igjen
	Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Leter fortsatt etter nye enheter. Trykk en gang til på LIFE -knappen for å avbryte. Prøv igjen
Varsling mottas ikke	Ikke sammenkoblet	Nullstill sammenkobling på siste enhet og koble sammen igjen
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender fungerer ikke	Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men ingen lyd	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
Portal: får ikke koblet til ny enhet	Ny enhet (IRIS SOL) er ikke tilkoblet internett/ mangler IP-adresse. Sjekk Innstillinger: System: Systeminfo og IP adresse.	Sjekk at internett-kabel er koblet til, koble fra strøm, vent 10 sekunder og koble til strøm. Sjekk om enhet har IP-adresse nå og koble til enhet i portal
Hvordan tilbake stille alle innstillinger?	Enhet skal leveres til ny bruker.	Koble enhet til internett og strøm. Gå til Innstillinger: System: Nullstill



HMS: 301386