

NORA SOL Armbåndskalender

Bruksanvisning



NORA SOL er en armbåndskalender som varsler kalenderpåminnelser fra IRIS SOL. Synkronisering med IRIS SOL foregår automatisk når NORA SOL er i nærheten av IRIS SOL. NORA SOL kan i tillegg varsle FlexiBlink LIFE alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd.

Klokkevisning aktiveres med et enkelt tapp på skjermen.

Ved varsling, vises et symbol og tekst på skjermen, samtidig med vibrasjon og lyd for det aktuelle varselet.

NORA SOL lades med den medfølgende USB-laderen.








Nøkkeldata

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Oppladbar med god batterilevetid
- Utbyttbar reim/ mulighet for klips-feste

1. OVERSIKT

	<p>Skjerm</p> <ul style="list-style-type: none"> Batteriindikator Lyd deaktivert Ikke tilkoblet LIFE-nett Skjermlås aktivert Klokke Dag Dato
	<p>Baksiden</p> <ul style="list-style-type: none"> Låsekontakt for reim/ klips Ladekontakt

Symboler

	<p>Klokka er fulladet.</p>		<p>Lyd er deaktivert.</p>
	<p>Klokka har 50% batteri-kapasitet.</p>		<p>Ikke tilkoblet LIFE-nett! Varslinger og alarmer vil ikke bli varslet.</p>
	<p>Klokka lader.</p>		<p>Skjermlås er aktivert. Deaktiver skjermlås med ved å gå inn på NORA SOL-menyen på den tilknyttede IRIS SOL eller koble IRIS SOL til laderen.</p>
	<p>Klokka må lades.</p>		



Klokken må kobles til laderen for at den skal slå seg på.

2. LADING

NORA SOL bør lades helt opp før bruk. Bruk den medfølgende laderen.

Enheten lades ved at ladekontakten «klipses» på ladekontaktene på baksiden av NORA SOL ved hjelp av magnet. Når den har «klipset» på, ligger ladekontakten rett vei. Hvis ikke, snu ladekontakt 180°. Husk å sett lader i stikkontakten.

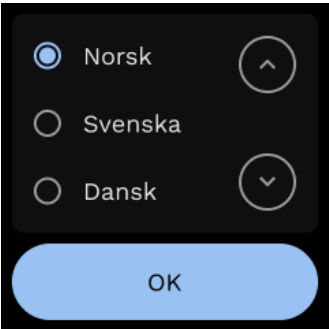
	<p>NORA SOL kan gi påminnelser og motta varslinger mens enheten lades.</p> <p>Ladetid inntil 6 timer. Bruktid nominelt 5 dager.</p>
	<p>Batteriindikatoren øverst i høyre hjørnet på displayet indikerer kapasiteten på batteriet (25, 50, 75 og 100%) eller lading.</p>


3. FØRSTEGANGSBRUK (SPRÅK OG SAMMENKOBLING)

For at NORA SOL skal fungere, må den sammenkobles til en IRIS SOL via FlexiBlink LIFE-nettet. NORA SOL går automatisk til språk og meny for sammenkobling når du starter klokka første gang.



NORA SOL kan ikke brukes uten IRIS SOL!

	<p>Velg ønsket språk, deretter OK.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

	<p>Koble NORA SOL til et eksisterende FlexiBlink LIFE-system (første gangs bruk).</p> <p>Velg Koble til LIFE-nett.</p>
	<p>De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter en egen LIFE-knapp for sammenkoblingen.</p> <p>IRIS SOL har LIFE-knappen på baksiden av enheten. Andre produkter har knappen under lokket. Se bruksanvisning for gjeldende produkt hvis du ikke finner LIFE-knappen.</p>
	<p>Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet i et system som NORA SOL skal sammenkobles til.</p> <p>Når sammenkoblingen har suksess, vil NORA SOL gå direkte til klokkevisning.</p>
	<p>For å kunne motta påminnelser på din NORA SOL, må den kobles direkte til din IRIS SOL.</p> <p>På IRIS SOL: gå til Innstillinger og NORA SOL. Trykk på Søk etter NORA SOL for å få påminnelser direkte til NORA SOL.</p>
	<p>Den søker etter NORA SOL i LIFE-nettet og du må velge din modell (hvis flere vises). Navnet NORASOL og serienummer vil vises. Serienummer finner du på baksiden av klokkehuset eller under Info i meny. Her kan du også fjern-låse menyen på NORA SOL.</p>


4. DAGLIG BRUK

Påminnelser

Påminnelser administreres ved hjelp av kalenderen i IRIS SOL. Disse synkroniseres automatisk med NORA SOL. Påminnelser kan også administreres på sol.vestfoldaudio.no via nettleser eller mobil hvis IRIS SOL er koblet til internettet og man har fått tilkoblingskode (fra IRIS SOL).

Påminnelser som er synkronisert, vil varsles selv om NORA SOL er utenfor dekningsområdet.

Dersom klokken er avslått eller befinner seg et sted utenfor dekningsområdet når påminnelsen opprettes, vil NORA SOL synkronisere eventuelle endringer utført på IRIS SOL når klokken igjen er påslått og befinner seg innenfor deknings-området.

 <p>Middag med Tone</p> <p>Restaurant M</p>	<p>NORA SOL varsler påminnelser med vibrasjon, lyd, symbol og tekst.</p> <p>Når du får en påminnelse; stopp påminnelsen ved å trykke på skjermen og swipe til siden for å fjerne den.</p> <p>Du kan vise påminnelsen igjen (hente den fram) de neste 5 minuttene ved å trykke på skjermen.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FlexiBlink LIFE

Har du annet FlexiBlink LIFE utstyr, kan NORA SOL også varsle disse:

- Daglige varslinger: dørklokke, telefon o.l.
- Alarm: brann, epilepsi, o.l.

NORA SOL varsler med vibrasjon, lyd, symbol og tekst når den mottar en varsling eller alarm.


Daglige varslinger varsles med rolig vibrasjon og lyd.


Alarmer varsles med hurtig vibrasjon og lyd.

For å stoppe en varsling, tapp på skjermen.

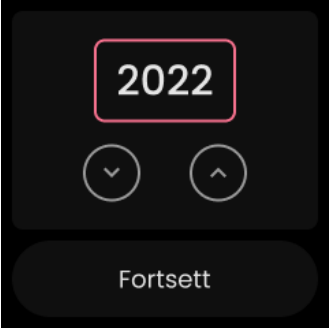
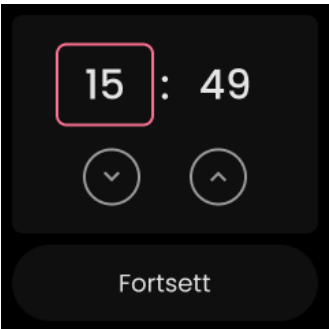
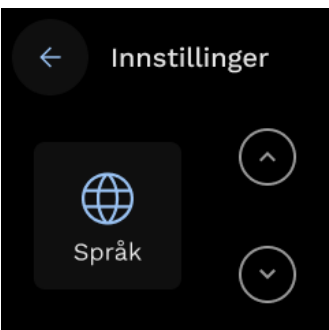
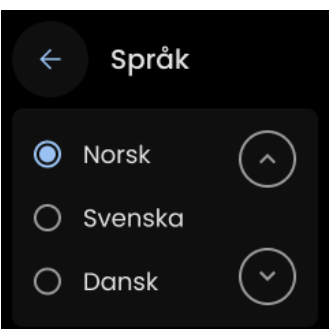
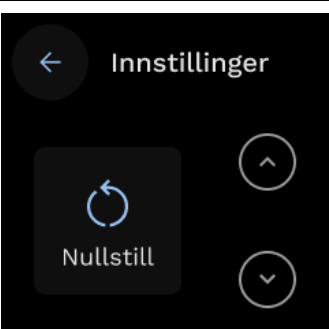
Meny

For å sette opp eller tilpasse NORA SOL må du inn i menyen.

 <p>Sveip ned igjen for meny</p>	<p>Sveip fra oversiden av skjermen og ned til undersiden av skjermen, 2 ganger, for å komme inn i menyen.</p> <p>Sveip fra undersiden av skjermen og opp til oversiden av skjermen, for å gå ut av menyen</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


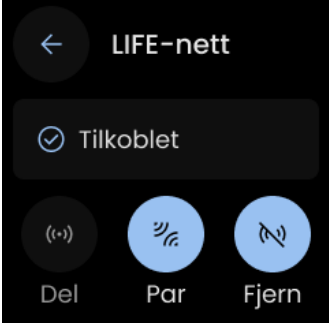

	<p>Menyen på NORA SOL kan låses fra IRIS SOL.</p> <p>NORA SOL vises et hengelås-symbol ved siden av batteri-symbol.</p>  <p>OBS! Meny kan kun låses opp igjen via IRIS SOL eller ved å sette NORA SOL i laderen.</p>
	<p>Meny</p> <ul style="list-style-type: none"> -Info -Lyd -Innstillinger -Slå av
	<p>Info</p> <p>Her vises produktinformasjon om bl.a. programvare. Dette er informasjon som benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.</p>
	<p>Lyd</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deaktiver lyd -Aktiver lyd
	<p>Slå av klokka</p> <p>Trykk Slå av for å slå av klokka.</p> <p>PS! Du må koble til lader for å starte klokka igjen!</p>


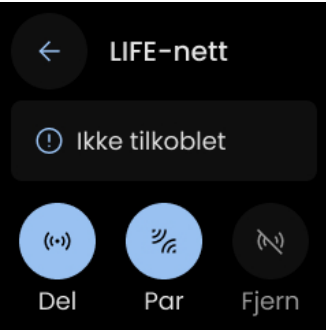


	<p>Innstillinger: LIFE-nett (se Sammenkoblingskapittel) Varslinger Dato og tid Språk Nullstill (fjern tilkoblinger og innstillinger)</p>
	<p>Innstillinger – Varslinger</p>
	<p>Innstillinger – Varslinger Med Kun alarmer aktiv vil ikke daglige signaler som dørklokke o.l. varsles.</p>
	<p>Innstillinger – Dato og tid</p>
	<p>Innstillinger – Dato og tid Velg Dato og juster med pil opp/ ned. Trykk Fortsett for å hoppe til neste felt. Velg Tid og juster med pil opp/ ned. Trykk Fortsett for å hoppe til neste felt. Når NORA SOL er innenfor dekning til IRIS SOL, vil klokke automatisk synkroniseres.</p>

	<p>Dato</p> <p>Still dato (år, måned og dato).</p> <p>Trykk på Fortsett-knappen for å komme videre.</p>
	<p>Tid</p> <p>Still klokke (time og minutt).</p> <p>Trykk på Fortsett-knappen for å komme videre.</p>
	<p>Innstillinger – Språk</p>
	<p>Innstillinger – Språk</p> <p>Velg ønsket språk. Bruk pilene for å bla ned.</p> <p>Når du har valgt nytt språk, bruk Pil tilbake</p>
	<p>Innstillinger – Nullstill</p>


	<p>Innstillinger – Nullstill</p> <p>For å fjerne alle innstillinger og tilkobling til LIFE-nett, kan man nullstille enheten.</p> <p>Dette gjøres f.eks. ved ny bruker.</p> <p>Trykk Fortsett.</p>
	<p>Bekreft med å trykke Nullstill.</p> <p>Klokka vil slå seg av.</p> <p>PS! Du må koble til lader for å starte klokka igjen!</p>

Sammenkobling

	
	<p>Avbryte/ fjerne sammenkobling</p> <p>Velg Innstillinger og deretter LIFE-nett.</p> <p>Trykk Fjern.</p>
	<p>Bekreft Fjern alle tilkoblinger? med å velge Fjern en gang til.</p>

	<p>Alle tilkoblinger er fjernet vises. Trykk OK</p>
	<p>Dele eller starte LIFE-nett fra NORA SOL NORA SOL kan dele nettverket den er koblet opp i, og kan da benyttes til å koble sammen nye enheter til samme nett. Velg Innstillinger og deretter LIFE-nett. Velg Del.</p>
	<p>Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.</p>
	<p>Sammenkoblingen bekreftes av klokken: Enhet er lagt til! Trykk OK.</p>

KLIPSFESTE

	<p>NORA SOL blir levert med armbåndsreim. Denne kan skiftes ut ved å holde låseknappen inne og skyve reimen ut av festet sideveis. Se kapittel 1 (oversikt – baksiden). Klipsfeste er tilgjengelig som tilbehør.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORLENGE REKKEVIDDEN

For en enebolig er dekning sjelden et problem. Hvis det likevel er behov for å utvide dekningsområdet mellom IRIS SOL og NORA SOL, kan man forlenge rekkevidden med en eller flere signalforsterkere (REPEATER-L).

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

NORA SOL vil varsle IRIS SOL når den må lades, i tillegg til at man får varsel på klokka.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

1. Klokken er ikke beregnet for å vekke en person i tilfelle brann. Det anbefales å bruke senge- eller pute-vibrator med kraftig vibrasjon og nødstrømbatteri, som er beregnet for vekking i forbindelse med brann.
2. Pass på at reimen ikke strammes for hardt slik at det blir ubehagelig å ha den på.
3. Om bruk av klokken forårsaker hud irritasjon eller allergi bør den ikke brukes direkte på huden. Merk at klokken og reimen er laget av materiale som har liten risiko for at dette skal kunne oppstå.
4. Om klokken er varm slik at det er ubehagelig å ha den på bør den ikke brukes før temperaturen reduseres. Dette kan for eksempel oppstå om den ligger i direkte sollys eller etter at den har blitt nylig ladet.
5. Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
6. NORA-L vil varsle til FlexiBlink LIFE mottakere om behov for batteribytte, hvis du har mottakere som viser dette.

TEKNISKE DATA

Mål med reim (LxBxH):	260x43x13 mm
Mål uten reim (LxBxH):	50x43x13 mm
Håndledd omkrets:	15-23 cm
Vekt:	52 g
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1-869.85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Lader:	5 V = 1 A

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

TILBEHØR & RESERVEDELER

			
NORA SOL Art.nr.: 1926 HMS: 301386	Klips sort Art.nr.: 1883 HMS: 289699	Lader med ladekabel Art.nr.: 9100101322 HMS: 289777	Klokkereim sort Art.nr.: 9100101426
Kalender med påminnelser. Sender påminnelser og varsler til NORA SOL	Tilbehør: Sort klips i stedet for klokkereim	Reserve del: Komplett lader med kabel for NORA SOL	Reserve del: Sort klokkereim

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Påminnelser varsles ikke i NORA SOL.	NORA SOL er ikke korrekt sammenkoblet.	Endre innstilling på IRIS SOL til å varsle NORA SOL. Se bruksanvisning for IRIS SOL.
Nye påminnelser blir ikke varslet i NORA SOL.	Avstanden mellom NORA SOL og IRIS SOL er for stor så synkronisering har ikke funnet sted.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en REPEATER-L for å utvide dekningsområdet.
Sammenkobling fungerer ikke.	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere.	Fjern sammenkobling og utfør ny sammenkobling.
NORA SOL vibrerer av seg selv uten at det varsles.	NORA SOL er nesten tom for strøm.	Koble NORA SOL til lader.
NORA SOL har sort skjerm og våkner ikke med tapping.	NORA SOL er avslått.	Koble NORA SOL til lader for å skru den på.
	NORA SOL er tom for strøm.	Koble NORA SOL til lader.
Ikke tilgang til meny.	NORA SOL har låst meny (hengelås-symbol).	Koble NORA SOL til lader.
Displayet blinker når NORA SOL lades.	Dårlig kontakt ved ladeplugg.	Kontroller tilkoblingen på laderen. Rengjør ladekontaktene på klokken om nødvendig.
Andre FlexiBlink LIFE-enheter varsles ikke i NORA SOL.	Avstanden mellom NORA SOL og FlexiBlink LIFE-sender er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en REPEATER-L.
	Feil med innstillinger.	Sjekk at ikke Kun alarmer er aktiv på NORA SOL.
	Systemfeil.	Nullstill til fabrikkinnstillinger. Vekk klokken ved å sette den i laderen etter at skjermen har gått i sort og utfør installasjon på nytt.

